

# НАБОР КОНТРОЛЕЙ HbA1c

## Лиофилизированный Контрольный Гемолизат

### 605803, HbA1c Control Set

Каталог. № : **605803**  
Производитель: **Dialab, (Австрия)**

Методика от **07-03-2007**  
Версия **02**



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

**Лиофилизированный контрольный гемолизат, приготовленный из электролитов человека, для качественного контроля количественного in-Vitro определения Гемоглобина A1c в крови на фотометрических системах**

Кат. №	Состав:		
<b>605803</b>	<b>3 x 1 мл</b>	1 x 1 мл	Контроль Нормальный
		1 x 1 мл	Контроль Средний
		1 x 1 мл	Контроль Высокий

Дополнительно предлагаются:  
601100 40 тестов Набор реагентов HbA1c

#### СОСТАВ

Стабилизированный кровяной Гемолизат приготовлен из человеческих эритроцитов с уровнями в нормальном диапазоне, неопределенном диапазоне и патологическом диапазоне.

#### ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЯ

1. Снять крышку и добавить 1 мл дистиллированной воды к контролю.
2. Закрыть крышкой и аккуратно перемешать до растворения.
3. Оставить Контроль на 30 минут при комнатной температуре и осторожно перемешать до тех пор, пока раствор не станет однородным и весь лиофилизированный материал не будет восстановлен.
4. Контроли должны быть использованы как обычные образцы (см. ручной процедуру тестирования).

#### СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Стабильность: до окончания срока годности  
2-8 °C

Стабильность после восстановления:  
2-8 °C 3 недели

**ЗАКРЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  
ЗАМОРАЖИВАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!**

#### ДАнные АНАЛИЗА, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПАРТИИ

Уровень	ЛОТ	Целевое значение, % (DCCT/NGSP)	Диапазон, % (DCCT/NGSP)
Нормальный	T712	4.9	4.3 – 5.5
Средний	T712	7.7	6.8 – 8.6
Высокий	T712	9.5	8.4 – 10.6

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хотя материал находится под контролем по инфекционным заболеваниям, HbsAg и ВИЧ, обращение должно проводиться в соответствии с руководящими принципами GLP для образцов пациентов.

#### УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Ссылаться на местные легальные требования по уничтожению отходов.



#### ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»  
ул.Черновола, 97  
г. Ивано-Франковск, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)