

## Інструкція з використання детергенту «Хітергент»

### Призначення

Детергент «Хітергент» призначений для промивання жолоба, зонда реагентів, важеля перемішування та чаші для аналізу автоматичного біохімічного аналізатора.

### Упаковка

REF.	Вміст
1305990003	500 г (г) x 1

### Принцип аналізу

Антибактеріальний засіб, який входить до складу очисного розчину, здатен знищувати бактерії в жолобі та чаші для аналізу, а речовина-пенетрант забезпечує видалення залишкових білків, ліпідів, продуктів кристалізації та барвників. Інгібітор піноутворення запобігає утворенню бульбашок повітря.

### Основні складники

NaHCO <sub>3</sub>	0,11 %
Доміфену бромід	0,10 %

### Підготовка

Помістіть очисний розчин у відповідне відділення дисків реагентів R1 і R2 у автоматичному біохімічному аналізаторі для промивання жолоба, зонда реагентів і важеля перемішування.

### Стабільність і зберігання

Детергент «Хітергент» слід зберігати в темному місці за температури 10–30 °С. Невідкритий розчин є придатним до використання до кінця терміну придатності, зазначеного на етикетках.

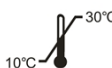


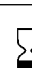




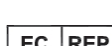

За потреби протріть або змочіть чашу для аналізу в 2 % розчині детергенту «Хітергент».

### Застереження щодо безпеки

- Лише для професійного використання.
- Перед використанням уважно прочитайте актуальну версію інструкції з використання детергенту «Хітергент», а також посібник із експлуатації автоматичного біохімічного аналізатора.
- Не змішуйте детергент «Хітергент» із кислотним промивальним розчином. Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності.
- Під час роботи з детергентом «Хітергент» вдягайте чисті рукавички.
- Уникайте потрапляння продукту в травний тракт, на шкіру та в очі. Якщо це сталося, випийте велику кількість води або, відповідно, промийте забруднену ділянку великою кількістю води й терміново зверніться до лікаря.
- Усі відходи, утворені у зв'язку з використанням детергенту «Хітергент», слід утилізувати відповідно до застосованих

місцевих законів і норм.

### Значення символів

 10°C–30°C	Температурний діапазон (Зберігайте при температурі 10–30 °C)	 REF	Номер за каталогом
	Виробник		Бережіть від прямих сонячних променів
	Кінцева дата терміну придатності		Цим боком догори
	Склад набору		Код партії
	Див. інструкцію з використання		Медичний прилад для діагностики <i>in vitro</i>
	Уповноважений представник в Європейському союзі		Знак відповідності технічним регламентам



**Шеньчжень Нью Індастріс Біомедікал Інжинірінг Ко., Лтд.,**  
№23 Джінксіу Еаст Роад, Пінгшан Дістрікт, 518122,  
Шеньчжень, Китайська Народна Республіка  
Тел: + 86 755 21536601 Факс: + 86 755 28292740



**Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  
Tel: +49-40-2513175  
Факс: +49 40 25 57 26



**Уповноважений представник в Україні:**  
ТОВ «Кратія Медтехніка», вул. Багговутівська,  
17-21, 04107, м. Київ, Україна.  
Тел.: 0 800 21-52-32 (безоплатно можуть телефонувати абоненти фіксованого та мобільного телефонного зв'язку з будь-якої точки України).  
Електронна пошта: uarep@cratia.ua

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: листопад 2020 року.