

ОЧИЩУЮЧИЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРІВ ГЕМОСТАЗУ

13180, Dia-Wash

Каталог. №: 13180

Методика від 09-2009

Виробник: **Diagon** (Угорщина)



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

ПРИЗНАЧЕННЯ

(Тільки для діагностики In Vitro)

Dia-Wash призначений для діагностики in vitro для щоденного обслуговування і очищення аналізаторів гемостазу.

КОРОТКИЙ ОПИС І ПРИНЦИП

Dia-Wash є дезактивуєчим розчином, що ефективно очищає відділення аналізаторів гемостазу.

АКТИВНІ ІНГРІДІЄНТИ

Соляна кислота	<1,0%
Миючий засіб	<1,0%

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, надруковано на етикетці.
- Всі реагенти, відходи та використане одноразове лабораторне обладнання слід розглядати як небезпечні відходи. Їх слід обробляти та утилізувати відповідно до чинних правил щодо обробки небезпечних матеріалів.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

1. Особа, яка встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним фахівцем.
2. Зверніться до Інструкції щодо використання приладу для подальшої інформації.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Невідкриті флакони Dia-Wash стабільні 24 місяці до дати закінчення терміну при зберіганні при температурі 2-8 °C в темному місці. Дивіться етикетку упаковки, щоб дізнатися термін придатності. Відкритий флакон стабільний при температурі 20-30 °C.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

При щоденному використанні Dia-Wash очищуйте трубки та резервуари для рідини у приладі, щоб забезпечити перебування фонових і перенесених значень в межах специфікацій приладу.

ОБМЕЖЕННЯ

Dia-Wash повинен використовуватися в межах діапазону температур навколишнього середовища 15-35 °C. Використання реагенту не замінює правильну роботу і обслуговування приладу.

НЕНАДАНІ ПОТРІБНІ МАТЕРІАЛИ

Dia-Wash рекомендується використовувати з наступними реагентами:

- Протромбіновий час (Dia-PT, Кат. №81100, 81050)
- Час активованого часткового тромбoplastину (Dia-PTT; Кат. №71048)
- Фібриноген (Dia-FIB, Кат. №61060)
- Час тесту на тромбін (Dia-TT, Кат. №51036)



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com



© Переклад на українську мову ТОВ «ДІАМЕБ»