

МІКРОАЛЬБУМІН/АЛЬБУМІН СЕЧІ КОНТРОЛЬ

MALB/UPROT CONTROL

Кат. №: 1478-0188

Дата випуску інструкції: 30-06-2020
Версія 02



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Пакування: (2 x 3) x 3 мл

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал для внутрішнього контролю якості аналізів Мікроальбуміну та Альбуміну сечі з використанням реагенту Medicon з аналізаторами Diatron Pictus® P700 та P500. Для діагностики *in vitro* лише для використання кваліфікованими лабораторними фахівцями.

СКЛАД

Альбумін людського походження та білки тваринного походження у водному буферному розчині. Консерванти.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ – ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Дотримуйтесь звичайних запобіжних заходів, необхідних для роботи з усіма лабораторними реагентами.
- Утилізуйте всі відходи відповідно до національних правил.
- Біологічні матеріали людського походження, що містяться в цьому продукті, були протестовані та показали, що вони не мають поверхневого антигену гепатиту В (HbsAg), антитіла до гепатиту С (HCV) та антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ-1 та ВІЛ-2).
- Оскільки не існує відомого методу контролю, який би міг забезпечити повну впевненість у тому, що продукти, отримані з крові людини, не передають збудників інфекції, ви повинні розглядати цей продукт як потенційно інфекційний матеріал. Матеріал містить азид натрію (NaN₃) < 0.1%. Уникайте контакту зі шкірою, очима та слизовими оболонками.
- Будь-який серйозний інцидент, що може статися з цим пристроєм, повинен повідомлятися користувачем виробнику та компетентному органу країни, в якій знаходиться користувач та/або пацієнт!



ПІДГОТОВКА

Матеріал готовий до використання. Дайте матеріалу досягти кімнатної температури. Акуратно переверніть флакони, щоб отримати однорідну суміш перед використанням. Уникайте піноутворення. Закрийте кришкою відразу після використання та зберігайте при температурі 2-8 °С.

Невідповідне зберігання, обробка або помилки під час аналітичної процедури можуть дати помилкові результати.



ЗБЕРІГАННЯ - СТАБІЛЬНІСТЬ

Вміст герметичного флакона стабільний до зазначеного терміну придатності, якщо зберігається при 2-8 °С. Після відкриття матеріал залишається стабільним протягом 2 місяців при щільному закупорюванні після використання при 2-8 °С.

ПРОЦЕДУРА

Зверніться до посібника користувача аналізатора щодо калібрування та контролю якості.

Кожна лабораторія повинна встановити власну частоту контролю, однак належна лабораторна практика передбачає тестування контролів щодня при вимірюванні зразків пацієнта та при кожному калібруванні.

Результати, отримані будь-якою окремою лабораторією, можуть відрізнятися від заданого середнього значення, але повинні знаходитись у відповідних допустимих межах, наведених у доданій таблиці.

Якщо виявляються будь-які тенденції або раптові зрушення значень, перегляньте всі робочі параметри. Кожна лабораторія повинна встановити вказівки щодо коригувальних дій, які слід вживати, якщо контролі не відновлюються в межах зазначених меж.

Переконайтеся, що ЛОТ на флаконі такий самий, як у таблиці значень, що додається до матеріалу.



ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ

Цей продукт містить азид натрію (NaN₃), який утворює чутливі вибухонебезпечні сполуки з міддю або свинцем. Промийте водопровідні труби водою після утилізації нерозведеного реагенту, щоб уникнути накопичення азиду в зливних трубах. Утилізуйте всі відходи відповідно до місцевих правил. Паспорт безпеки доступний для професійного використання за запитом.

ПРИЗНАЧЕНІ ЗНАЧЕННЯ – Специфічні для лоту

Будь ласка, зверніться до таблиці значень конкретного лоту, доступного на <https://medicondoc.com>.

СИМВОЛИ



Виробник



Температурні обмеження



Застереження



Медичний прилад для використання в *in vitro* діагностиці



Каталоговий номер



Біологічні ризики



ВИРОБНИК

МЕДІКОН ХЕЛЛАС С.А.
вул. Мелітона, 5-7
153 44 Геракас, Греція
Тел: +302106606000
Факс: +302106612666
www.mediconsa.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

