

АМІАК КОНТРОЛЬ

AMMONIA CONTROL

Кат. №: 1478-1045

Дата випуску інструкції: 28-08-2015
Версія 01



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Для дискретних аналізаторів

Код товару: 1478-1045
Пакування: Рівень 1: 2 x 5 мл
Рівень 2: 2 x 5 мл
Зберігати при: 2-8 °C
Тільки для використання *in vitro*

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал для контролю якості визначення аміаку, використовуючи реагенти MEDICON на MEDILYZER®, серії Diatron Pictus, BECKMAN COULTER AU400/600/600-IVD/640/2700/5400, ADVIA 1200/1800/2400, DIMENSION® RxL/RxL HM/RxL Max/RxL Max HM/Xpand/Xpand HM/Xpand Plus/Xpand Plus HM/EXL/EXL LOCI Модуль, на автоматизованих аналізаторах та всіх інших дискретних аналізаторах. Тільки для діагностики *in vitro*.

СКЛАД

Хлорид амонію у водному буфері, стабілізатор, консервант.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Тільки для використання *in vitro*.
- Містить азид натрію (NaN₃) <0,1%. Уникайте контакту зі шкірою, очима та слизовими оболонками.

ПІДГОТОВКА

Матеріал готовий до використання. Дозвольте матеріалу досягти кімнатної температури. Перед застосуванням обережно оберніть кожну ампулу, для отримання однорідної суміші. Уникайте піноутворення. Закрийте кришкою відразу після використання та зберігайте при температурі 2-8 °C. Неправильне зберігання, поводження або помилки під час проведення аналітичної процедури можуть дати помилкові результати.

ПОТРІБНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ З НАБОРОМ

- Реагент амонію.
- Автоматизований аналізатор біохімії.
- Звичайне лабораторне обладнання.

ЗБЕРІГАННЯ - СТАБІЛЬНІСТЬ

Вміст флаконів, невідкритих, є стабільним при температурі 2-8 °C до терміну придатності, зазначеного на етикетці. Після відновлення вміст залишається стабільним протягом 2 тижнів при зберіганні щільно закритими при температурі 2-8 °C після кожного використання.

ДЕТЕРІОРАЦІЯ

Матеріал не слід використовувати

- Після тривалого впливу прямих сонячних променів або високої температури
- Після закінчення терміну придатності
- Коли мікробний ріст очевидний

ПРОЦЕСТЕСТУВАННЯ

Зверніться до посібника користувача аналізатора щодо процесу контролю якості.

Кожна лабораторія повинна встановити власну частоту контролю, однак належна лабораторна практика передбачає, що кожен день слід проводити контроль разом з аналізом зразків пацієнтів та проводити щоразу калібрування. Результати, отримані будь-якою окремою лабораторією, можуть відрізнитися від заданого середнього значення, але повинні знаходитися у відповідних прийнятних діапазонах, наведених у доданій

таблиці. Якщо виявлені якісь тенденції або різкі зрушення значень, перегляньте всі робочі параметри. Кожна лабораторія повинна встановлювати вказівки щодо коригуючих дій, які слід вжити, якщо контроль не відновиться у визначених межах.

Переконайтесь, що ЛОТ на флаконі такий самий, як на аркуші, що супроводжує матеріал.

ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ

Цей продукт містить азид натрію (NaN₃), який утворює чутливі вибухонебезпечні сполуки з міддю або свинцем. Промийте стічні труби водою після утилізації нерозведеного реагенту, щоб уникнути накопичення азиду в зливних трубах. Утилізуйте всі відходи відповідно до місцевих рекомендацій щодо інфекційних або потенційно інфекційних матеріалів. Інформаційний лист безпеки надається для професійного використання на запит.

ПРИЗНАЧЕНІ ЗНАЧЕННЯ – Специфічні для лоту

Зверніться до таблиці призначених значень. Діапазон представляє максимально прийнятне відхилення лише для одного вимірювання.

СИМВОЛИ



Температурні обмеження (L/H)



Читайте інструкцію



Код партії (ISO 15223/rev. EN980)



Термін придатності (ISO 15223/rev. EN980)



Виробник



Кат. № (ISO 15223/rev. EN980)



Для використання *in vitro* (ISO 15223/rev. EN980)



ВИРОБНИК

МЕДІКОН ХЕЛЛАС С.А.
вул. Мелітона, 5-7
153 44 Геракас, Греція
Тел: +302106606000
Факс: +302106612666
www.medicons.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

