

НЬА1с ДЕНАТУРАНТ

НЬА1с Denaturant

Кат. №: 1518-1059

Дата випуску інструкції: 30-06-2020
Версія 1.3



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Спеціально для використання з аналізаторами Diatron PICTUS® 700 та PICTUS® 500

Пакування: 2 x 100 мл

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Додатковий (Лізинг) реагент для попередньої обробки зразків цільної крові людини для кількісного автоматизованого визначення In Vitro Гемоглобіну А1с - НЬА1с.

Реагент Medicon розроблений спеціально для використання з аналізаторами Diatron Pictus® P700 та P500.

Для діагностики in vitro лише кваліфікованими фахівцями лабораторії.

СКЛАД

Свинячий пепсин

Буфер рН 2.4

Консервант

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Дотримуйтесь звичайних запобіжних заходів, необхідних при роботі з реагентами.
- Утилізуйте всі відходи відповідно до місцевих правил.
- Будь-який серйозний інцидент, що може статися з цим пристроєм, повинен повідомлятися користувачем виробнику та компетентному органу країни, в якій знаходиться користувач та/або пацієнт!

ПІДГОТОВКА

Medicon Денатурант Гемоглобіну готовий до використання.

ЗБЕРІГАННЯ - СТАБІЛЬНІСТЬ

Денатурант Гемоглобіну стабільний, якщо нерозкритий, до встановленого терміну придатності при зберіганні при 2-8 °С. Після відкриття Денатурант Гемоглобіну стабільний до зазначеного терміну придатності, за умови, що він вільний від забруднення, щільно закритий одразу після кожного використання і зберігається при температурі 2-8 °С.

ЗРАЗОК

K2-EDTA або NH4-гепаринізована кров.

Перед використанням попередньо обробити зразки та контролю вручну, додавши 25 мкл цільної крові до 1000 мкл Денатуранта Гемоглобіну [1:41], перемішати, уникаючи піноутворення та інкубувати протягом 5 хвилин при кімнатній температурі перед використанням. Калібратори не потребують попередньої обробки.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУ

Зверніться до таблиці призначених значень. Діапазон являє собою максимально допустиме відхилення лише для одного вимірювання.

СИМВОЛИ



Виробник



Температурні обмеження



Застереження



Медичний прилад для використання в *in vitro* діагностиці



Каталоговий номер



Достатньо для <n> тестів



ВИРОБНИК

МЕДІКОН ХЕЛЛАС С.А.
вул. Мелітона, 5-7
153 44 Геракас, Греція
Тел: +302106606000
Факс: +302106612666
www.mediconsa.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

