

ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН PRESTIGE 24i

PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION

Кат. №: 3-104

Дата випуску інструкції: 04-2022



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва реагенту

PRESTIGE 24i ЛУЖНИЙ МИВНИЙ РОЗЧИН

Пакування

500 мл (ml)

Кат. №

3-104

ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН PRESTIGE 24i призначений для очищення кювет таких біохімічних аналізаторів: Biolis 24i Premium і Biolis 30i.

Призначений тільки для діагностики *in vitro*, для використання медичними працівниками.

ПРИНЦИП ДІЇ

PRESTIGE 24i ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН - це промивний розчин, підключений до аналізатора. Видалення біологічних матеріалів і залишків реагентів, особливо матеріалів, що містять білок, і мікробних відкладень з кювет відбувається завдяки очисним властивостям реагенту. PRESTIGE 24i ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН містить гідроксид натрію та фермент, який розчиняє та видаляє органічні частинки.

КОНЦЕНТРАЦІЯ АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ В РЕАГЕНТІ

гідроксид натрію

1.25 моль/л (mol/l)

САВІНАЗА

0.06%

ПАР

консервант

СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТУ

Реагент необхідно використати до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.

Після відкриття розведений реагент стабільний протягом 30 днів при кімнатній температурі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Захищати від прямого сонячного світла!
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.
- Не змішуйте реагент, що залишився, з реагентом з нової упаковки.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту, щоб запобігти контакту зі зразками, реагентами та контролями.
- Уникайте скидання в каналізацію або в навколишнє середовище.
- Будь ласка, зверніться до MSDS для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.
- Продукт відповідає критеріям класифікації відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

Інгредієнти:

PRESTIGE 24i ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН містить гідроксид натрію та реакційну масу 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-оне та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-оне (3:1).

Небезпека



H314 Викликає сильні опіки шкіри та подразнення очей.

H318 Спричиняє серйозні подразнення очей.

H317 Може викликати алергічну реакцію шкіри.

H412 Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками.

H290 Може викликати корозію металів.

P280 Одягайте захисні рукавички, захисний одяг, засоби захисту очей або обличчя.

P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжуйте полоскання.

P310 Негайно зателефонуйте в токсикологічний центр або до лікаря.

P273 Уникайте викиду в навколишнє середовище.

P234 Зберігати тільки в оригінальній упаковці.

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

PRESTIGE 24i ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН слід використовувати як 2% розчин. Перед використанням змішайте 2 частини промивного розчину з 98 частинами дистильованої води.

Використовуйте відповідно до інструкції з експлуатації аналізатора.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ¹

Після використання з реагентами слід поводитися як з потенційно інфекційними та утилізувати відповідно до вимог місцевого законодавства.

- Залишки реагентів: 18 01 06*
- Порожні пакунки: 15 01 10*
- Стічні води з аналізатора: 18 01 03*

ІНЦИДЕНТИ²

Про будь-який серйозний інцидент, який стався у зв'язку з пристроєм, слід повідомити виробника (веб-адреса: incidents@cormay.pl) та компетентний орган держави-члена, в якій перебуває користувач та/або пацієнт.

Серйозний інцидент означає будь-який інцидент, який прямо чи опосередковано призвів, міг призвести або може призвести до будь-чого з наступного:

- смерть пацієнта, користувача або іншої особи,
- тимчасове або постійне серйозне погіршення стану здоров'я пацієнта, користувача або іншої особи,
- серйозна загроза здоров'ю населення.

ЛІТЕРАТУРА

- European Commission notice on technical guidance on the classification of waste (2018/C 124/01) of 9 April 2018.
- Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on *in vitro* diagnostic medical devices.

СПИСОК ЗМІН

Попередня версія: 05

Поточна версія: 06

Оновлено розділи: СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТУ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

