



Набор для определения Антител к HBe

HBeAb ELISA KIT

Кат. номер : 137-3891
Количество : 96
Производитель : DRG (USA)

Методика проверена 2004-06-07

Внимание: основой при проведении анализа есть оригинал инструкции на англ. языке.

Данный набор используется для определения антител к гепатиту В в человеческой плазме или сыворотке.

ПРИНЦИП ТЕСТА

Очищенный анти-HBe привит к твердой фазе ячеек. Образцы сыворотки, рекомбинант анти-HBeAg, и пероксидаза хрена (конъюгированный) меченый с Anti-HBe добавляются в привитые ячейки и формируют конкурентную комбинацию. После инкубации, если Anti-HBe присутствует в образце в больших количествах, формируется комплекс HBeAg- анти- HBe- анти- HBe меченый пероксидазой хрена. Промойте ячейки для удаления комплекса и инкубируйте с субстратом (ТМВ). Соответственно не наблюдается смены цвета или есть небольшое изменение цвета. Если анти-HBe не присутствует в образце –будет существенное изменения цвета. Тест специфический, чувствительный, воспроизводимый и легкий в работе.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Храните при 2-8 °С. Компонент стабильный до даты истечения срока указанного на упаковке. Не замораживать и не использовать после даты истечения срока годности.

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

1. Anti-HBe привитый микропланшет – 1 блок (96 ячеек).
2. Энзимный конъюгат – 1 бут., 6 мл
3. Положительная контрольная сыворотка – 1 бут. 0,5 мл
4. Отрицательная контрольная сыворотка – 1 фл., 0,5 мл
5. Моющий буфер (1:20 разбавьте перед использованием) – 1 бут., 30 мл
6. Субстрат А – 1 бут.6 мл
7. Субстрат В – 1 бут.6 мл
8. Стоп раствор – 1 бут., 6 мл
9. Нейтрализующий реагент – 1 бут. 6 мл.
10. Бумага для накрытия – 1 шт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Встряхните бутылки с реагентами хорошо перед использованием, удалите 1-2 капли и капайте вертикально.
2. Приведите все реагенты и образцы к комнатной температуре (приблизительно за 30 минут),

- положите оставшиеся реагенты в пакет при 2-8°С.
3. NaN3 нельзя использовать для консервации реагентов.
4. Не меняйте реагенты наборов разных лотов.
5. Результаты необходимо считать в течении 10 минут.
6. Растворите концентрат моющего раствора при 37°С, если появляются кристаллы.
7. Используйте реагенты, образцы и контроли как потенциально инфицированные.
8. Бумагу для накрытия нельзя использовать повторно.
9. Разбавьте моющий раствор дистиллированной водой 1:20 перед использованием.
10. Не используйте набор после истечения срока пригодности.
11. Срок пригодности 12 месяцев.

ТЕСТОВАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Поставьте 1 бланк, 2 положительных и два отрицательных контроли для каждого теста, добавьте 0,05 мл образца сыворотки, положительной и отрицательной контрольной сыворотки в привитые ячейки, потом добавьте одну каплю (приблизительно 0,05 мл) нейтрализующего реагента в каждую ячейку. (Ячейка бланка пропускается), и наконец добавьте одну каплю энзимного конъюгата в те же привитые ячейки (ячейка бланка пропускается), тщательно перемешайте и инкубируйте 60 минут при 37°С.
2. Ручная процедура промывания: удалите жидкость из привитых ячеек и дайте возможность им высохнуть. Наполните ячейки моющим раствором, удалите жидкость и высушите их. Повторите 5 раз. Автоматическая моющая процедура: выберите 5 автоматических операций промывания и дайте возможность им высохнуть после каждой операции.
3. Добавьте одну каплю (приблизительно 0,05 мл) субстрата А и В соответственно в каждую ячейку и инкубируйте 10 минут при 37°С.
4. Добавьте 1 каплю (приблизительно 0,05 мл) стоп раствора в каждую ячейку, тщательно перемешайте и измерьте абсорбцию при 450 нм против бланка.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Колориметрический метод

Вычисление величины исключения:

COV = средняя ОП отрицательного контроля x 0,5

Положительный ОП 450 образца \geq COV

Отрицательный: ОП 450 образца < COV

Неверный: если ОП положительного контроля ниже или равно 1,000, результаты считаются неверными. В любом случае повторите анализ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность: 4NCU/мл, ОП \leq 0,600

Специфичность средняя ОП 20 нормальных отрицательных сывороток \geq 2,000

Точность KB(%) \leq 20% (n=10)

Информация для заказа:

ЧМП «ДИАМЕБ»

ул. Чорновола, 97, г. Ивано-Франковск, 76005

Тел.: (0342) 775122

Факс: (0342) 775612

E-mail: info@diameb.com

www.diameb.com