

α1-МІКРОГЛОБУЛІН КАЛІБРАТОРИ

CORMAY ALPHA1-MGLOB CALIBRATORS (U)

Кат. №: 4-285

Дата випуску інструкції: 09-2011



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору	Склад набору	Кат. №
CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (U)	4 x 1 мл	4-285

ВСТУП

α 1-мікроглобулін (αMi) є глікопротеїном з низькою молекулярною вагою (24-33 кДа), який був спочатку виділений із сечі пацієнтів з нирковими тубулярними розладами в 1975 році. Він головним чином синтезується в печінці і широко поширений в різних рідинах організму.

Вимірювання αMi в сироватці і сечі було прийнято корисним для діагностики функціонального ниркового розладу, оцінки прогресу та прогнозу захворювань.

НАБІР калібраторів CORMAY ALPHA 1-MGLOB (U) був приготований розведенням α 1-мікроглобуліну (αMi) з буферним розчином, що містить 1% вага/об'єм бичачого сироваткового альбуміну в різних концентраціях.

НАБІР калібраторів CORMAY ALPHA 1-MGLOB (U) призначений для калібрування визначення α 1-мікроглобуліну на автоматичних аналізаторах.

УПАКОВКА

4 різних концентрації x 1 мл.

Калібратори готові до використання.

Точна концентрація αMi вказана на етикетці.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

Нерозкритий калібратор стабільний при 2-10 °C до закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі. Тримайте далеко від світла.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Продукт призначений тільки для діагностики in vitro.
- Так як колір ковпачків змінюється залежно від концентрації αMi у флаконах, будьте уважні не переплутати ковпачки.
- Не змішувати калібратори з калібраторами з інших флаконів.
- Використовувати калібратори відповідно до даної інструкції.
- Калібратори засновані на людській сироватці, яка була протестована на наявність антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) і гепатиту С (HCV) і антитіл до ВІЛ, і виявилися неактивними. Тим не менш, з ними необхідно поводитись як з потенційно біологічно небезпечним матеріалом з дотриманням усіх необхідних заходів обережності.
- Калібратори містять азид натрію (< 0.1%) в якості консерванту. Уникайте контакту зі шкірою та слизовими оболонками.

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Калібратори αMi підготовлені відповідно до стандартів підприємства.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

ПЗ КОРМЕЙ С.А.

вул. Віосенна, 22

05-092 м. Ломянки, Польща

тел.: +48 (0) 81 749 44 00

факс: +48 (0) 81 749 44 34

<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»

вул. Чорновола, 97

м. Івано-Франківськ, 76005

тел.: +38 (0342) 775 122

факс: +38 (0342) 775 123

e-mail: info@diameb.ua

www.diameb.ua

