

ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН ПРЯМИЙ КАЛІБРАТОРИ

CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATORS

Кат. №: 4-308

Дата випуску інструкції: 12-2023



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

CORMAY КАЛІБРАТОРИ HbA1c ПРЯМИЙ

Кат. № 4-308

4 x 0.5 мл (ml)

- КАЛІБРАТОР HbA1c ПРЯМИЙ 1 1 x 0.5 мл (ml)
- КАЛІБРАТОР HbA1c ПРЯМИЙ 2 1 x 0.5 мл (ml)
- КАЛІБРАТОР HbA1c ПРЯМИЙ 3 1 x 0.5 мл (ml)
- КАЛІБРАТОР HbA1c ПРЯМИЙ 4 1 x 0.5 мл (ml)

ПРИЗНАЧЕННЯ

Набір КАЛІБРАТОРІВ CORMAY HbA1c ПРЯМИЙ призначений для підготовки калібрувальної кривої для прямого методу визначення HbA1c. Калібратори повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

ВСТУП

Визначення HbA1c - найпоширеніше дослідження в оцінці контролю глікемії при цукровому діабеті. Величина HbA1c надає інформацію про рівень глюкози за 4-8 тижнів, що передували дослідженню.

ПРИСВОЄНІ ЗНАЧЕННЯ

Точні значення гемоглобіну A1c вказані на аркуші аналізу, що входить до складу набору.

СКЛАД НАБОРУ

HbA1c DIRECT CALIBRATOR 1	1 x 0.5 мл (ml)
HbA1c DIRECT CALIBRATOR 2	1 x 0.5 мл (ml)
HbA1c DIRECT CALIBRATOR 3	1 x 0.5 мл (ml)
HbA1c DIRECT CALIBRATOR 4	1 x 0.5 мл (ml)

РОЗВЕДЕННЯ

1. Обережно зняти ковпачок з флакона і додати точно 0.5 мл (ml) деіонізованої води.
2. Закрити ковпачок, обережно перемішувати протягом 10 хвилин до повного розчинення матеріалу.
3. Перед дослідженням відновлені калібратори повинні бути оброблені ГЕМОЛІЗУЮЧИМ РЕАГЕНТОМ відповідно до інструкції до набору HbA1c DIRECT.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

- Не відкритий калібратор стабільний при 2-8 °C (°C) до дати закінчення терміну придатності, нанесеної на флакон.
- Компонент у відновленому калібраторі стабільний протягом: 4 тижнів при 2-8 °C (°C) або 8 тижнів при -20 °C (°C).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Захищати від прямих сонячних променів і уникати забруднення!
- Калібратор заснований на крові людини, яка була перевірена на HBsAg і антитіла до ВІЛ і ВГС і виявилася нереактивною. Однак із цим матеріалом слід поводитись як із таким, що може передавати інфекційні захворювання.
- Уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками.
- Звертатися до паспорту безпеки для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Калібратори CORMAY HbA1c DIRECT простежуються до стандартів IFCC за допомогою калібратора Tosoh.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

PZ KORMEY S.A.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

