

ЛІПОПРОТЕЇН (а) КОНТРОЛЬ N

CORMAY Lp(a) CONTROL N

Кат. №: 4-492

Дата випуску інструкції: 12-2023



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору
CORMAY Lp(a) CONTROL N
CORMAY Lp(a) CONTROL P

Склад набору
5 x 1 мл (мл)
5 x 1 мл (мл)

Кат. №
4-492
4-493

ПРИЗНАЧЕННЯ

CORMAY Lp(a) CONTROL N і CORMAY Lp(a) CONTROL P є контрольними сироватками, для визначення концентрацій ліпопротеїну (а). Реагенти повинні використовуватися лише для діагностики *in vitro* кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, за відповідних лабораторних умов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CORMAY Lp(a) CONTROL N і CORMAY Lp(a) CONTROL P є ліофілізованими людськими сироватками, що містять ліпопротеїн (а).

ПРИСВОЄНІ ЗНАЧЕННЯ

Точні концентрації ліпопротеїну (а) зазначені на етикетці кожного флакону.

СКЛАД НАБОРУ

CORMAY Lp(a) CONTROL N	5 x 1 мл (мл)
Lp(a) CONTROL N	
CORMAY Lp(a) CONTROL P	5 x 1 мл (мл)
Lp(a) CONTROL P	

РОЗВЕДЕННЯ

Обережно витягніть гумову пробку з флакона і додайте 1 мл (мл) дистильованої води. Закрийте у і залиште при кімнатній температурі на 15 хвилин, час від часу обережно перемішуючи вміст.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

- Ліофілізована сироватка при температурі 2-10 °C (°C) зберігає стабільність протягом усього терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- Розведена контрольна сироватка стабільна 2 тижні при 2-10 °C (°C).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Захищати від прямих сонячних променів та уникати забруднення.
- Розведена контрольна сироватка готова до використання.
- Під час виймання гумової пробки уникайте втрат ліофілізату, який прилип до внутрішньої частини пробки. Використовуйте лабораторні рукавички, одяг та інше при роботі і ретельно мийте руки після використання.
- Продукти людського походження були протестовані на наявність антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) і гепатиту С (ВГС) і антитіл до ВІЛ і виявились неактивними. Тим не менш, з ними необхідно поводитися як з потенційно біологічно небезпечним матеріалом з дотриманням усіх необхідних заходів обережності.
- Уникайте контакту зі шкірою та слизовими оболонками.
- Якщо реагенту недостатньо для вимірювання, додавання нового реагенту слід уникати, оскільки це може призвести до помилок вимірювання.
- Цей продукт слід використовувати згідно з інструкцією до набору.
- ЕУН210 Паспорт безпеки засобу надається за запитом.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Дотримуватися вимог місцевого законодавства.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

