

# Розчинник сечі

## Urine diluent

Кат. №: 42005007

Дата випуску інструкції: 09-07-2019  
Версія A/4



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

**Назва продукту**  
Розчинник сечі.

**Пакування**  
50 мл (ml)/флакон

**Призначення**  
Використовується для розведення зразків сечі і дозволяє спеціалістам використання з аналізаторами електродів для визначення концентрації калію (K<sup>+</sup>), натрію (Na<sup>+</sup>), хлоридів (Cl<sup>-</sup>), кальцію (Ca<sup>2+</sup>) і магнію (Mg<sup>2+</sup>) в сечі людини.

**Принцип тестування**  
Метод ISE: Використовуйте технологію ISE (іоноселективний електрод) для вимірювання K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Ca<sup>2+</sup> і Mg<sup>2+</sup> в зразку.

**Основні компоненти**  
Іонний буфер і консервант.

**Необхідні, але не надані матеріали**  
Відсутні

**Зберігання та транспортування**  
Температура навколишнього середовища 2-30°C, відносна вологість 20-85%, уникати потрапляння прямих сонячних променів. Продукт слід транспортувати із зовнішньою упаковкою.

**Застосовувані прилади**  
Аналізатори електродів.

**Вимоги до зразка**  
Зразки необхідно проаналізувати протягом однієї години при кімнатній температурі.

**Методи тестування**  
Співвідношення між розчинником сечі та зразком становить 10 : 1.

**Референсний діапазон**  
Не застосовується.

**Інтерпретація результатів тесту**  
Результати призначені лише для ознайомлення лікарів. Щоб зробити клінічний висновок слід також врахувати клінічні симптоми пацієнта та результати інших аналізів.

**Калібрування та КЯ**  
Не застосовується.

**Обмеження методів тестування**  
Не застосовується.

**Індикатор продуктивності**  
Не застосовується.

**Заходи безпеки**  
1. Продукт слід використовувати протягом терміну придатності. Припинити використання, якщо упаковка пошкоджена, розчин помутнішав, запліснявив або випав осад.

2. Якщо реагент необережно розбризкується на шкіру, очі тощо, негайно змити чистою водою, а якщо помилково проковтнете, звернутися до лікаря.
3. Відходи від клінічного застосування цього продукту слід утилізувати згідно з відповідними положеннями щодо медичних відходів.

### Графічні символи

|  |   |  |                                       |
|--|---|--|---------------------------------------|
|  | Дата виробництва                                |  | Виробник                              |
|  | Уповноважений представник у Європейському союзі |  | Діагностичний реагент <i>in vitro</i> |
|  | CONFORMITE EUROPEENNE                           |  | Кат. №                                |
|  | № партії  |  | Термін придатності                    |
|  | Основний компонент                              |  | Об'єм                                 |
|  | Температурний режим                             |  |                                       |

**Інформація про навчання**  
Будь ласка, зверніться до посібника користувача.

**Довідкова інформація**  
Якщо вам потрібна допомога, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування.

**Вирішення проблем**  
Будь ласка, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування.

**Список літератури**  
Не застосовується.

**Номер дозволу на виробництво медичних пристроїв**  
GuangDong SFDA (Державна адміністрація харчових продуктів та лікарських засобів) отримав дозвіл на виробництво медичних пристроїв № 20041046.

**Гарантія та технічна підтримка**  
Якщо повторюється повідомлення про невідні результати або вам потрібна технічна підтримка, зверніться до Центру обслуговування та підтримки користувачів Genrui.

**Дата затвердження та перегляду інструкції**  
Дата затвердження: 09 липня 2019 року  
Дата перегляду: 09 липня 2019 року



### ВИРОБНИК

Genrui Biotech Inc  
4-10F, Building 3, Geya  
Technology Park, Guangming  
District,  
518106, Shenzhen, China  
Phone: +86-755-2683 5560  
Fax: +86-755-2667 8789  
Web: www.genrui-bio.com

ГЕНРУЙ БІОТЕК ІНК  
4-10Ф, Будівля 3,  
Технологічний Парк Гея  
Район Гуанмін, 518106,  
Шеньчжень, Китай  
Тел.: +86-755-2683 5560  
Факс: +86-755-2667 8789  
Веб: www.genrui-bio.com



**УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ**

ТОВ «Діамеб трейд»

вул. Симона Петлюри, буд. 25

м. Івано-Франківськ, 76014, Україна тел.: +380 (342) 77 51 22

e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)

[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

