

# ЕТАНОЛ КАЛІБРАТОР 100

## CORMAY ETHANOL CALIBRATOR 100

Кат. №: 5-106

Дата випуску інструкції: 09-2020



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

| Назва набору                  | Склад набору   | Кат. № |
|-------------------------------|----------------|--------|
| CORMAY ETHANOL CALIBRATORS    | 10 x 1 мл (ml) | 5-105  |
| CORMAY ETHANOL CALIBRATOR 100 | 10 x 1 мл (ml) | 5-106  |

### ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Калібратори для визначення концентрації етилового спирту. Набір КАЛІБРАТОРИ CORMAY ETHANOL призначений для калібрування визначення етанолу на автоматичних аналізаторах.

Набір КАЛІБРАТОР CORMAY ETHANOL 100 призначений для калібрування етанолу, що визначається вручну.

Калібратор повинен застосовуватися лише для діагностики *in vitro* кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, за відповідних лабораторних умов.

### ВСТУП

Етанол після споживання всмоктується в шлунково-кишковий тракт і транспортується кров'ю по всьому організму. Невелика кількість етанолу виділяється з сечею або вдихається з повітрям, але більшість метаболізується печінкою до оцтового альдегіду, потім до ацетату, а потім до вуглекислого газу та води. Споживання етанолу часто є причиною різних видів нещасних випадків, і отруєння етанолом може бути причиною загибелі.

### ПАКУВАННЯ

#### КАЛІБРАТОРИ CORMAY ETHANOL

|                      | Розмір        | Концентрація      |
|----------------------|---------------|-------------------|
| КАЛІБРАТОР ЕТАНОЛУ 1 | 5 x 1 мл (ml) | 100 мг/дл (mg/dl) |
| КАЛІБРАТОР ЕТАНОЛУ 2 | 5 x 1 мл (ml) | 300 мг/дл (mg/dl) |

#### КАЛІБРАТОР CORMAY ETHANOL 100

|                        | Розмір         | Концентрація      |
|------------------------|----------------|-------------------|
| КАЛІБРАТОР ЕТАНОЛУ 100 | 10 x 1 мл (ml) | 100 мг/дл (mg/dl) |

Концентрації етилового спирту надруковані на етикетці кожного флакона та в цій інструкції.

### СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Не відкриті калібратори стабільні при 15-25 °C (°C) до дати закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- Стабільність після відкриття:

Вміст ампули слід використовувати негайно після відкриття, оскільки зміна концентрації відбувається через випаровування етанолу.

Відкриту ампулу можна використовувати лише один раз!

Не заморожувати стандарти!

### ПРОЦЕДУРА

- Калібратори готові до використання.
- Обережно перемішайте калібратори перед використанням.

### ПРИМІТКИ

- Не використовуйте калібратори після закінчення терміну придатності.

### ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Значення калібраторів були визначені за допомогою кваліфікованого NIST SRM 2893 газового хроматографа/детектора полум'яної іонізації (GC/FID).

### УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



### ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.  
Wiosenna 22,  
05-092 Lomianki, Poland  
phone: +48 (0) 81 749 44 00  
fax: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.  
вул. Віосенна, 22  
05-092, м. Ломянки, Польща  
тел.: +48 (0) 81 749 44 00  
факс: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»  
вул. Симона Петлюри, буд. 25  
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна  
тел.: +380 (342) 77 51 22  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

