

# ЖОВЧНІ КИСЛОТИ КОНТРОЛІ

## CORMAY BILE ACIDS CONTROLS



### ВИРОБНИК

Кат. №: 5-149

Дата випуску інструкції: 12-2023



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

PZ CORMAY S.A.  
Wiosenna 22,  
05-092 Lomianki, Poland  
phone: +48 (0) 81 749 44 00  
fax: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.  
вул. Віосенна, 22  
05-092, м. Ломянки, Польща  
тел.: +48 (0) 81 749 44 00  
факс: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>

Назва набору  
CORMAY BILE ACIDS CONTROLS

Склад набору  
2 x 1 мл (мл)

Кат. №  
5-149



CORMAY BILE ACIDS CONTROLS призначені для поточного контролю концентрації жовчних кислот у сироватці крові людини. Реагенти повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набір містить ліофілізовані контролі двох рівнів (низький - L і високий - H).

### ПРИСВОЄНІ ЗНАЧЕННЯ

Точні значення жовчних кислот, які відрізняються від партії до партії, наведені на етикетці кожного флакона.

### СКЛАД НАБОРУ

BILE ACIDS CONTROL (L)	1 x 1 мл (мл)
BILE ACIDS CONTROL (H)	1 x 1 мл (мл)

### ПРОЦЕДУРА

- Обережно відкрити флакон і додати рівно 1 мл (мл) деіонізованої води.
- Закрити пляшку і залишити на 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Злегка перемішати кілька разів, щоб переконатись, що вміст повністю розчинено.

### СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

- Ліофілізована сироватка залишається стабільною при зберіганні при -20 °C (°C) до дати закінчення терміну придатності зазначеного на етикетці.
- Компоненти у розведеній контрольній сироватці стабільні упродовж 2 тижнів при температурі від 2 до 8 °C (°C) і 3 тижнів при -20 °C (°C).

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Захищати від прямих сонячних променів і уникати забруднення!
- Не використовувати контролі після закінчення терміну придатності.
- Рекомендується лише одне заморожування відновленої сироватки! Приготування порцій і заморожування слід проводити відразу після відновлення. Розморожувати при кімнатній температурі протягом приблизно 30 хвилин. Обережно покрутити кілька разів під час розморожування.
- Контролі основані на бичачій сироватці, яка була протестована на наявність інфекційних речовин та визначена як негативна. Проте, цей матеріал слід розглядати як такий, що здатен передавати інфекційні захворювання.

### УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до вимог місцевого законодавства.

### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»  
вул. Симона Петлюри, буд. 25  
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна  
тел.: +380 (342) 77 51 22  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

