

КОНТРОЛЬ СЕЧІ РІВЕНЬ 2 CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2

Кат. №: 5-162

Дата випуску інструкції: 12-2023



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору	Склад набору	Кат. №
CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1	3 x 10 мл (мл)	5-161
CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2	3 x 10 мл (мл)	5-162



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

ПРИЗНАЧЕННЯ

CORMAY URINE CONTROL РІВЕНЬ 1 та РІВЕНЬ 2 призначені для рутинного контролю якості органічних та неорганічних компонентів в сечі.

Реагенти повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CORMAY URINE CONTROL РІВЕНЬ 1 та РІВЕНЬ 2 виготовлені на основі сечі людини з додаванням хімічних речовин, консервантів і стабілізаторів для пригнічення мікробного росту.

ПРИСВОЄНІ ЗНАЧЕННЯ

Присвоєні значення, різні для кожної партії, зазначені в інструкціях для кожного флакона. Значення метричних показників наявні на двох рівнях.

СКЛАД НАБОРУ

CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1	3 x 10 мл (мл)
CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2	3 x 10 мл (мл)

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

1. Витягнути контролі з холодильника і дати їм досягти кімнатної температури (18-25 °C (°C)).
2. Обережно покрутити, щоб забезпечити однорідність вмісту. Уникати спінювання.
3. Використовувати контролі в якості зразка пацієнта відповідно до вимог методу тестування.
4. Негайно закрити контролі та повернути їх до зберігання при 2-8 °C (°C), коли вони не використовуються.

СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ

1. Контроль сечі залишається стабільним до дати закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо він зберігається закритим при 2-8 °C (°C).
2. Зберігати контроль сечі щільно закритим, щоб уникнути забруднення.
3. Відмовитися від використання контролю, якщо спостерігається надмірна каламутність або наявність будь-яких ознак мікробного забруднення.
4. Продукт після відкриття та зберігання щільно закритим при 2-8 °C (°C) буде стабільним протягом 30 днів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Середні значення креатиніну можуть знижуватися протягом усього терміну придатності контролю.
- Використовувати контроль сечі з урахуванням аналітичного діапазону окремих діагностичних наборів для визначення параметрів, що входять у таблицю значень.
- Контролі виготовлені на основі сироватки були протестовані на антитіла на HBsAg, ВІЛ та ВГС і виявилися нереактивними. Тим не менше, цей матеріал слід розглядати як такий, що здатний передавати інфекційне захворювання.
- EUN208 Містить реакційну масу 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1). Може викликати алергічну реакцію.
- EUN210 Паспорт безпеки засобу надається за запитом.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Дотримуватися вимог місцевого законодавства.

