

КОНТРОЛЬ ЛІПІДІВ 1

CORMAY LIPID CONTROL 1

Кат. №: 5-179

Дата випуску інструкції: 12-2019



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

CORMAY LIPID CONTROL 1

Кат. № 5-179

3 x 1 мл (мл)

CORMAY LIPID CONTROL 2

Кат. № 5-180

3 x 1 мл (мл)

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

CORMAY LIPID CONTROL 1 та CORMAY LIPID CONTROL 2 призначені для рутинного контролю якості концентрацій прямого ЛПВГ, прямого ЛПНГ, холестерину та тригліцеридів. Концентрації компонентів доступні на 2 рівнях.

Реагенти повинні використовуватися лише для діагностики *in vitro*, кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, за відповідних лабораторних умов.

РОЗВЕДЕННЯ

Обережно відкрийте флакон і додайте рівно 1 мл (мл) дистильованої води, закрийте пляшку і дайте відстоятися протягом 30 хв. Переконайтесь, що всі сліди сухого матеріалу розчинені, обережно повертаючи.

Уникайте утворення піни.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

1. Ліофілізована сироватка стабільна до дати, зазначеної на упаковці, при зберіганні за температури 2-8 °C (°C).
2. Компоненти відновленої контрольної сироватки стабільні протягом:

Кімнатна температура	8 годин
Темп. 2-8 °C (°C)	7 діб
Темп. -20 °C (°C)	30 діб

ЗАУВАЖЕННЯ

- Ця сироватка тестувалася на антитіла до ВІЛ, HBsAg і гепатит С і виявилася нереактивною. Однак з цим матеріалом слід поводитись як з таким, що здатний передавати інфекційні захворювання.

ПРИПИСАНІ ЗНАЧЕННЯ

Приписані значення - це значення, отримані за допомогою різних систем клінічної хімії.

Кожній лабораторії рекомендується встановити власні значення та допустимі діапазони.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Дотримуватися вимог місцевого законодавства.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

