

КРЕАТИНкіНАЗА-МВ КОНТРОЛЬ Н

CORMAY СК-МВ CONTROL N

Кат. №: **5-183**

Дата випуску інструкції: **02-2012**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору

CORMAY СК-МВ CONTROL N
CORMAY СК-МВ CONTROL P

Склад набору

1 x 3 мл (ml)
1 x 3 мл (ml)

Кат. №

5-183
5-184

CORMAY КК-МВ КОНТРОЛЬ Н і CORMAY КК-МВ КОНТРОЛЬ П є ліофілізатами, приготованими з людської сироватки. Вони призначені для стандартного якісного контролю активності КК-МВ. Точні об'єми КК-МВ вказані на етикетці флакона.

ПІДГОТОВКА

1. Витягти флакони з холодильника і дати їм нагрітися до кімнатної температури протягом 15- 20 хвилин.
2. Видалити ущільнення і гумову пробку з флакона. Відміряти і додати точно 3 мл дистильованої або деіонізованої води. Вода, використовувана для приготування, повинна бути кімнатної температури.
3. Обережно закрийте пляшку і дайте постояти протягом 30 хв. Переконайтеся, щоб всі сухі частинки матеріалу розчинилися, обережно помішуючи.
4. Використовувати відразу ж або зберігати в холодильнику при температурі 2-8 °С (°C) для подальшого використання.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

1. Ліофілізована сироватка стабільна при 2-8 °С (°C) до закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі.
2. Складові у відновленій контрольній сироватці стабільні протягом 4 тижнів при температурі 2-8 °С (°C).
3. Тримайте далеко від світла і тепла!

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ЗАУВАЖЕННЯ

- Продукт призначений тільки для діагностики in vitro.
- Контрольна сироватка повинна використовуватися тільки за призначенням, кваліфікованим персоналом лабораторії, у належних лабораторних умовах.
- Дана контрольна сироватка була протестована на наявність антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) і гепатиту С (ВГС) і антитіл до ВІЛ, і виявилася нереактивною. Тим не менш, з нею необхідно звертатися як з потенційно біологічно небезпечним матеріалом з дотриманням усіх необхідних заходів обережності.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Дотримуватися вимог місцевого законодавства.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

