

КОНТРОЛІ ГЛІКОЗИЛЬОВАНОГО ГЕМОГЛОБІНУ HbA1c (3 рівні)



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної
продукції та лабораторних приладів в ІЗ
НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обдъект М55, 2351
Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at

HbA1c Control Set (3 levels)

Каталог. №: 605803

Дата випуску інструкції: 07-03-2007
Версія 02



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Ліофілізований контрольний гемолізат, приготований з електролітів людини, для якісного контролю кількісного in-Vitro визначення Гемоглобіну А1с в крові на фотометричних системах

Кат. №	Склад:		
605803	3 x 1 мл	1 x 1 мл	Контроль Нормальний
		1 x 1 мл	Контроль Середній
		1 x 1 мл	Контроль Високий

Додатково пропонуються:
601100 40 тестів Набір реагентів HbA1c

СКЛАД

Стабілізований кров'яний гемолізат приготований з людських еритроцитів з рівнями в нормальному діапазоні, невизначеному діапазоні і патологічному діапазоні.

ПІДГОТОВКА КОНТРОЛЯ

- Зняти кришку і додати 1 мл дистильованої води до контролю.
- Закрити кришкою і акуратно перемішати до розчинення.
- Залишити Контроль на 30 хвилин при кімнатній температурі і обережно перемішати до тих пір, поки розчин не стане однорідним і весь ліофілізований матеріал не буде відновлений.
- Контролі повинні бути використані як звичайні зразки (див. Ручну процедуру тестування).

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ КОНТРОЛЯ

Стабільність: до закінчення строку придатності
2-8 °C

Стабільність після відновлення:
2-8 °C 3 тижні

ЗАКРИТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ. ЗАМОРОЖУВАТИ ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ!

ДАНІ АНАЛІЗУ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПАРТІЇ

Рівень	ЛОТ	Цільове значення, % (DCCT/NGSP)	Діапазон, % (DCCT/NGSP)
Нормальний	T712	4.9	4.3 – 5.5
Середній	T712	7.7	6.8 – 8.6
Високий	T712	9.5	8.4 – 10.6

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Хоча матеріал знаходиться під контролем з інфекційних захворювань, HbsAg та ВІЛ, поводитись у відповідності з керівними принципами GLP для зразків пацієнтів.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Посилатися на місцеві легальні вимоги щодо знищення відходів.



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

