

# ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ

## LYSING REAGENT CN FREE

Кат. №: **8-502**

Дата випуску інструкції: **07-2017**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №

<b>8-500</b>	РОЗЧИННИК (20 л)
<b>8-501</b>	ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ (400 мл)
<b>8-502</b>	ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ (6 x 400 мл)
<b>8-503</b>	ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ EO (1 л)
<b>8-504</b>	ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ BASO II (1 л)
<b>8-505</b>	ФЕРМЕНТНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ РОЗЧИН (1 л)

### Для діагностики in vitro

#### КОРОТКИЙ ОПИС

Лічильники крові АВХ PENTRA використовують імпеданс та оптичну технологію для вимірювання кількості клітин у розведеному зразку крові. Розведення відбувається за допомогою ізотонічного розчину, який є провідником, але не лізує клітини крові.

Еритроцити/тромбоцити обчислюються за допомогою імпедансної різниці, яка утворюється проходженням клітин крізь відкалібровану мікроапертуру.

Гемоглобін вимірюється спектрофотометрично після лізису еритроцитів. Лейкоцити підраховуються аналогічно еритроцитам і одночасно аналізуються методиками на основі імпедансометрії та оптики.

Три окремих розведення готуються для лейкоцитів (LMNE), лейкоцитів/BASO та еритроцитів/тромбоцитів/гемоглобіну.

#### ЗАБІР ТА ЗБЕРІГАННЯ

**ABX PENTRA 60, ABX PENTRA 80** є мультипараметричними автоматичними аналізаторами для гематологічного дослідження цільної крові, зібраної в пробірці EDTA.

Див. забір та зберігання в посібнику оператора до апарату.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Перед проведенням аналізу зразок обережно перемішують. Не змішувати різні серії реагентів.

#### ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Реагенти повинні зберігатися при 18 -30 °C й використовуватися до терміну придатності, зазначеного на етикетці.

#### ДОВІДКА

Див. інструкцію користувача до аналізаторів.

#### ЗАСТОСУВАННЯ (для діагностики In Vitro)

**DILUENT** (РОЗЧИННИК) є буферним розчином, призначеним для розведення зразка крові перед аналізом.

**ENZYMATIC CLEANER** (ФЕРМЕНТНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ РОЗЧИН) призначений для видалення забруднень білка з вимірювальної системи аналізатора після кожного аналізу крові. Наявність ферменту знижує утворення скупчення білків.

**LYSING REAGENT CN FREE** (ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ) є лізуючим агентом для отримання спектрофотометричного вимірювання гемоглобіну.

**LYSING REAGENT EO** (ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ EO) лізує еритроцити і стабілізує нативні форми білих кров'яних тілець. Він також забарвлює ядра еозинофілів.

**LYSING REAGENT BASO II** (ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ BASO II) руйнує мембрани всіх лейкоцитів за винятком базофілів, які потім диференціюються.

Ці реагенти є функціональним набором для виконання аналізу зразка крові на гематологічному аналізаторі.

#### КОМПОНЕНТИ

РОЗЧИННИК	ФЕРМЕНТНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ РОЗЧИН
хлорид натрію < 10 г/л бензоат натрію < 2 г/л буфер < 3 г/л поверхнево-активний комп. < 1 г/л	хлорид натрію < 8 г/л фторид натрію < 1 г/л буфер < 3 г/л консервант < 5 г/л поверхнево-активний комп. < 2 г/л протеолітичні ферменти < 12 г/л
ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ CN ВІЛЬНИЙ	ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ EO
поверхнево-активні речовини < 0,5 г/л солі четвертинного амонію 25 - 30 г/л	хлорид натрію < 7 г/л хлорид калію < 6 г/л сіль четвертинного амонію < 1 г/л консервант < 28 г/л поверхнево-активний комп. < 7 г/л
ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ BASO II	
хлорид натрію < 10 г/л поверхнево-активний комп. < 2 г/л сіль четвертинного амонію < 4 г/л	
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ	
Хімічні відходи, як правило, відносяться до спеціальних відходів. Утилізація останніх регулюється відповідними законами і нормами. Рекомендується звернутися до відповідних органів або підприємств з утилізації відходів, які проконсультують Вас про те, як розпоряджатися спеціальними відходами.	
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	
Для діагностичного застосування In Vitro. Тільки для професійного використання.	
<b>ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ EO</b> містить глутаральдегід. Може спричинити алергічну реакцію (EUN208).	
За додатковою інформацією звертайтеся до Паспорту безпеки речовини.	



#### ВИРОБНИК

ПЗ КОРМЕЙ С.А.

вул. Віосенна, 22

05-092 м. Ломянки, Польща

тел.: +48 (0) 81 749 44 00

факс: +48 (0) 81 749 44 34

<http://www.cormay.pl>



#### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»

вул. Чорновола, 97

м. Івано-Франківськ, 76005

тел.: +38 (0342) 775 122

факс: +38 (0342) 775 123

e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)

[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

