

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ КХ 21 CN ВІЛЬНИЙ

LYSING REAGENT KX 21 CN FREE

Кат. №: 8-877

Дата випуску інструкції: 03-2022



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва реагенту	Варіант	Кат. №
ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ КХ21 CN ВІЛЬНИЙ	500 мл (mL)	8-877

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ КХ 21 CN ВІЛЬНИЙ призначений для лізису еритроцитів для вивільнення гемоглобіну з метою подальшого аналізу гемоглобіну на гематологічних аналізаторах: SYSMEX KX-21 і SYSMEX KX-21N. Він готує лейкоцити до процесу диференціювання субпопуляцій. Призначений тільки для діагностики *in vitro*, для використання медичними працівниками.

ПРИНЦИП ДІЇ

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ КХ 21 CN ВІЛЬНИЙ розміщується на борту аналізатора. Завдяки лізуючим властивостям реагенту можна порушити клітинну мембрану еритроцитів і звільнити клітинний вміст для підготовки до подальшого аналізу. ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ КХ 21 CN ВІЛЬНИЙ містить поверхнево-активні речовини, які лізують еритроцити, і лейкозахисні агенти, які захищають стан лейкоцитів, дозволяючи диференціювати субпопуляції.

КОНЦЕНТРАЦІЯ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН В РЕАГЕНТІ

солі четвертинного амонію 0.87 %
імідазол
хлорид натрію
стабілізатори

СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТУ

Реагент необхідно використати до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.
Після відкриття реагент стабільний 90 днів при кімнатній температурі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Захищати від прямих сонячних променів!
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.
- Не змішуйте залишки реагенту з реагентом із нової упаковки.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту, щоб запобігти контакту зі зразками, реагентами та контролями.
- Уникайте скидання в каналізацію або навколишнє середовище.
- Будь ласка, зверніться до MSDS для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.
- ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ КХ 21 CN ВІЛЬНИЙ відповідає критеріям класифікації відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008. H412 Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками. P273 Уникати потрапляння в навколишнє середовище.

ПРИЛАДИ, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЄДНАННІ З РЕАГЕНТОМ

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ КХ 21 CN ВІЛЬНИЙ призначений для використання в поєднанні з розчинником, розчином FLUSH/FLUSH SET і відповідним гематологічним аналізатором.

Назва	Кат. №
РОЗЧИННИК ПЛЮС	8-875
FLUSH (1 л (L))	8-832
FLUSH (50 мл (mL))	8-891
FLUSH SET	8-896
SYSMEX KX21	Н/Д
SYSMEX KX21 N	Н/Д

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

ЛІЗУЮЧИЙ РЕАГЕНТ КХ 21 CN ВІЛЬНИЙ готовий до використання. Дотримуйтеся інструкції з експлуатації аналізатора. Перед першим використанням нерозкритий реагент необхідно зберігати не менше 24 годин при кімнатній температурі.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ¹

Після використання з реагентами слід поводитися як з потенційно інфекційними та утилізувати відповідно до вимог місцевого законодавства.

- Залишки реагентів: 18 01 06*
- Порожні пакунки: 15 01 10*
- Стічні води з аналізатора: 18 01 03*

ІНЦИДЕНТИ²

Про будь-який серйозний інцидент, який стався у зв'язку з пристроєм, слід повідомити виробника (веб-адреса: incidents@cormay.pl) та компетентний орган держави-члена, в якій перебуває користувач та/або пацієнт.

Серйозний інцидент означає будь-який інцидент, який прямо чи опосередковано призвів, міг призвести або може призвести до будь-чого з наступного:

- смерть пацієнта, користувача або іншої особи,
- тимчасове або постійне серйозне погіршення стану здоров'я пацієнта, користувача або іншої особи,
- серйозна загроза здоров'ю населення.

ЛІТЕРАТУРА

- European Commission notice on technical guidance on the classification of waste (2018/C 124/01) of 9 April 2018.
- Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on *in vitro* diagnostic medical devices.

СПИСОК ЗМІН

Попередня версія: 51_03_13_006_01	Поточна версія: 51_03_13_020_01
Створення нового формату документа.	



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

