

КОНТРОЛЬНА ПЛАЗМА АТ ПАТОЛОГІЯ

Dia-MULTI P

Каталог. №: 90212

Дата випуску інструкції: 02-03-2009

Версія: 1



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №: 90212

12 x 1 мл

Кат. №: 90201

1 x 1 мл

НАЗВА ПРОДУКТУ

Dia-MULTI P

ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ

Для забезпечення якості або контролю аналізів коагуляції: антитромбін (АТ) для діагностики in vitro.

ОПИС ПРОДУКТУ

Dia-MULTI P (Кат. №: 90212, 90201) являє собою ліофілізовану, цитратно-антикоагульовану людську плазму, з вмістом коагулянтів в межах або поблизу референтних значень для нормальних індивідуумів. Цей контроль є дійсним тільки для АТ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей продукт містить речовини людського походження і вважається інфекційним. Продукт слід розглядати як плазму забір від пацієнта. З метою мінімізації небезпеки інфекції, кожну одиницю плазми, яка була використана під час виробництва, була перевірена і не виявлено антитіл до ВІЛ, вірусу гепатиту В і вірусу гепатиту С.

РОЗВЕДЕННЯ

- 1) Перед відкриттям, потрусіть пляшку, щоб перемішати порошкоподібний матеріал, що накопичився на дні.
- 2) Додайте 1,00 мл води хорошої лабораторної якості. Температура води повинна бути від 15 до 25 °С.
- 3) Після додавання води знову закрийте пляшку і поверніть її десять або більше разів між долонями у вертикальному положенні, назад і вперед, щоб розчинити залишки порошку на внутрішній поверхні пляшки.
- 4) Через 15 хвилин контрольна плазма готова до використання. Контролюйте візуально, щоб весь матеріал повністю розчинився, якщо не використовуєте змішувач.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Закритий реагент стабільний до дати закінчення терміну за умови зберігання при температурі 2-8 °С. Стабільність після розведення: 12 годин при 15 - 25°C в оригінальному флаконі.

12 годин при температурі 2 - 8 °С в оригінальному флаконі. (Переконайтеся, що перед використанням контроль кімнатної температури).



ВИРОБНИК

ДІАГОН ЛТД.
вул. Барош, 48-52,
H-1097 Будапешт, Угорщина
Тел.: +36 1 3696500
Факс: +36 1 3696301
Web: www.digon.com
e-mail: digon@diagon.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

