

# НАБІР СТАНДАРТІВ ЛІТІУ (3 РІВНІ)

## Lithium Standard Set (3 levels)

Каталог. №: **910280**

Дата випуску інструкції: **2010/03/16**  
Версія **01**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

| Кат. №:          | Вміст:          |   |                            |
|------------------|-----------------|---|----------------------------|
| <b>910280</b>    | <b>3 x 3 мл</b> | 1 x 3 мл L1<br>1 x 3 мл L2<br>1 x 3 мл L3 | Готовий комплект           |
| <b>910280SV</b>  | <b>3 x 3 мл</b> | 1 x 3 мл L1<br>1 x 3 мл L2<br>1 x 3 мл L3 | Флакони з етикеткою (ОЕМ)  |
| <b>910280VSV</b> | <b>3 x 3 мл</b> | 1 x 3 мл L1<br>1 x 3 мл L2<br>1 x 3 мл L3 | Флакони без етикетки (ОЕМ) |

### СКЛАД

Водний буферний розчин з хімічними реагентами та консервантами.

### ПІДГОТОВКА СТАНДАРТУ

Стандарти рідкі, і готові до використання.

Обережними рухами перемішайте вміст перед використанням.

### ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ СТАНДАРТУ

Зберігання:

При 2 – 8 °C

Стабільність:

До закінчення терміну придатності, якщо щільно закритий.

### ЗАКРИТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ!

Не використовуйте стандарти, якщо є видимі ознаки росту мікробів у флаконі.

### ДАНІ АНАЛІЗУ ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ЛОТУ

| ЛОТ:     | 2137/LS100110-1  | EXP.: 2011/08         |
|----------|------------------|-----------------------|
| Рівень   | Лот              | Значення<br>[ммоль/л] |
| Рівень 1 | 2137/LLS100110-1 | 0.00                  |
| Рівень 2 | 2137/LLS200110-1 | 1.50                  |
| Рівень 3 | 2137/LLS300110-1 | 3.00                  |

**Значення та термін придатності є характерними для кожного окремого ЛОТУ.**

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Цей продукт призначений тільки для in vitro діагностики.
2. Дотримуватись встановлених запобіжних заходів під час роботи з лабораторними реагентами.
3. Причиною помилкових результатів може бути неналежне зберігання або неправильна обробка зразків, пов'язаних із інструментом або процедурою аналізу.
4. Стандарти містять азид натрію, який може реагувати зі свинцем або міддю і формувати вибухонебезпечні речовини. Змити в каналізацію великою кількістю води при утилізації цих стандартів. Уникати контакту зі шкірою та очима. Не ковтати. Зберігайте контейнер щільно закритим та подалі від продуктів харчування, напоїв та корму для тварин.

### ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, дотримуйтесь місцевих законних вимог.



### ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ  
Виробництво та продаж хіміко-технічної  
продукції та лабораторних приладів в ІЗ  
НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351  
Вінер-Нойдорф  
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,  
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,  
e-mail: [office@dialab.at](mailto:office@dialab.at)



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

