



КАЛИБРАТОР ВЫСОКИЙ АРО А1/А2/В

Кат. № : А00717

Производитель: DIALAB (Австрия)

Методика от 03-02-2004

Внимание: основой при проведении анализа есть оригинал инструкции на англ. языке.

Жидкий человеческий калибратор для использования в иммунотурбидиметрических анализах.

| Ссылка | Содержимое |
|--------|---|
| А00716 | 1 x 1 мл Калибратор высокий АРО А1/А2/В |
| А00717 | 1 x 5 мл Калибратор высокий АРО А1/А2/В |

СОСТАВ

Калибратор высокий АРО А1/А2/В – это дефибринированная человеческая плазма, стабилизированная в жидкой основе и профильтрованная через пористый фильтр 0,2 мк. Консервант: 0,095 % азид натрия.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Калибратор находится в жидком виде, готовый к использованию.
2. Используйте калибратор высокий АРО А1/А2/В в тот же способ как требуется по отношению к реагенту и/или аппарату.
3. Перед использованием позвольте калибратору достичь комнатной температуры (22–28°C).
4. Калибратор не должен оставаться в течении длительных периодов времени (до 6 часов) при комнатной температуре. Держите неиспользуемые флаконы все время плотно закрытыми, чтобы избежать микробиологического загрязнения. Неиспользуемые флаконы храните в холодильнике.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Хранение: при 2 – 8°C
Стабильность: до окончания срока годности
Стабильность после вскрытия: до 6 недель при 2 – 8°C
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ДАнные ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПАРТИИ НАБОРА

Значения и срок годности зависят от ПАРТИИ набора. См. данные таблицы по определенной партии.

РЕГУЛИРОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Ссылайтесь на Ваши местные требования законодательства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Для применения в диагностике in vitro.
2. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная для изготовления протеинового калибратора оказалась не реактивной во время проверки утвержденными FDA методами на HbsAg, анти-HCV и анти-ВИЧ, и анти-ВИЧ 1+2. Поскольку нет возможности окончательно исключить передачу продуктами человеческой крови носителей инфекций, рекомендуется обращаться с этим материалом и всеми образцами пациентов как со способными передавать инфекционные болезни.

ПРИПИСАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Номер партии: S67H41 Срок годности: 2010/01

| Параметр | Приписанное значение мг/дл |
|----------|-------------------------------|
| АРО А1* | 361 |
| АРО А2** | 66.3 |
| АРО В*** | 328 |

*Стандартизован согласно референтного АРО А1 IFCC (SP1-01)

**Стандартизован согласно CRM 324 BCR

***Стандартизован согласно референтного АРО В IFCC (SP2-01)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

ЧМП «ДИАМЕБ»
Ул. Чорновола, 97, г. Ивано-Франковск, 76005
Тел.: (0342) 775122
Тел/факс: (0342) 775612
E-mail: info@diameb.com