

КАЛІБРАТОРИ ТРАНСФЕРИНУ (5 РІВНІВ)

Transferrin Calibrator 5 L. Series

Каталог. №: **A00960**

Дата випуску інструкції: **2012/11**
Версія **03**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Рідкі калібратори, людського походження, призначені для використання в якості калібраторів в імунотурбідиметричних аналізах для Трансферину

Кат. № **Вміст**
A00960 5 x 1 мл 5-Рівневий Калібратор Трансферину

СКЛАД

Dialab Калібратори Трансферину – це калібратори дефібринованої та деліпидованої плазми людини, стабілізованої та фільтрованої рідини через фільтр розміром 0.2 мк.

Азид натрію: 0.095 %

ПІДГОТОВКА

Калібратор Серії Трансферину є рідким, і готовим до використання.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Зберігання: при температурі 2-8 °С
Стабільність: до закінчення терміну придатності
Стабільність після відкриття: 6 тижнів при 2-8 °С
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- Використовуйте ці Калібратори таким же чином, як вказано по відношенню до реагенту і /або приладу, який використовується.
- Дозвольте Калібраторам досягнути кімнатної температури (22-28 °С) перед використанням.
- Калібратори не можна залишати протягом тривалого періоду часу (до 6 годин) при кімнатній температурі. Тримайте флакони весь час щільно закритими, щоб уникнути мікробного забруднення. Невикористовувані флакони зберігайте в холодильнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТРЕЖЕННЯ

- Для використання в *in vitro* діагностиці.
- Кожна окрема донорська одиниця використана для виготовлення білкового калібратора, була протестована на гепатит В поверхневий антиген (HbsAg), вірус анти-гепатит С (анти-HVC) і анти-ВІЛ 1 та ВІЛ- 2 за вимогами FDA. Оскільки, тестовий метод не може остаточно гарантувати, що продукти отримані з крові людини не містять вірусу ВІЛ-1/2, гепатиту В і Гепатиту С, цей матеріал та всі зразки пацієнта повинні оброблятися, так, ніби вони здатні передавати інфекційні хвороби.
- Реагенти, які містять азид натрію потрібно обробляти з особливою обережністю: не ковтати, уникати контакту зі шкірою або слизовою! Азид натрію може утворювати вибухонебезпечні азиди при контакті з важкими металами, такими як мідь або свинець.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відповідно до місцевих правил.

ДАНІ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

Значення і термін придатності є специфічними для кожного лоту.

ЛОТ:0616		Термін придатності: 2017/09
Параметр	Рівень	Визначене значення*
Трансферин	Рівень 1	102.0 мг/дл
Трансферин	Рівень 2	198.0 мг/дл
Трансферин	Рівень 3	238.0 мг/дл

Трансферин	Рівень 4	392.0 мг/дл
Трансферин	Рівень 5	484.0 мг/дл
Значення простежуються до RPPHS/ERM-DA470k/IFCC.		



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351
Вінер-Нойддорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

