

# КОНТРОЛЬ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ (CO<sub>2</sub>)

## CO<sub>2</sub> Control

Каталог. №: **D16525SV**

Дата випуску інструкції: **2016/03/31**  
Версія **01**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

**Контрольний матеріал для контролю якості кількісного визначення in vitro двоокису вуглецю (CO<sub>2</sub> бікарбонат) у сироватці або плазмі людини у фотометричних системах.**

Кат. №	Вміст	
<b>D16525</b>	<b>3 x 3 мл</b>	Набір
<b>D16525SV</b>	<b>1x 3 мл</b>	Одинарний флакон

### СКЛАД КОНТРОЛЮ

Водний розчин з хімічними добавками.  
Азид натрію (NaN<sub>3</sub>) < 0.1%

### ПІДГОТОВКА КОНТРОЛЮ

Контроль є рідким і готовий до використання.

### ПРОЦЕДУРА ТЕСТУ

Будь ласка, зверніться до вкладиша реагенту для отримання інструкцій щодо застосування.

### ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ КОНТРОЛЮ

Температура зберігання: від +2 до +25 °C  
Стабільність: до кінця місяця, зазначеного в терміні придатності

Стабільність після відкриття: 3 місяці, якщо закрити одразу після використання

Необхідно дотримуватися належного зберігання та поводження з цим продуктом.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТРЕЖЕННЯ

1. Містить азид натрію (0.95 г / л) як консервант. Не ковтати! Уникайте контакту зі шкірою і слизовими оболонками.
2. Будь ласка, зверніться до листів безпеки та вживайте необхідних запобіжних заходів для використання калібраторів та контролів.
3. Тільки для професійного використання!

### ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відповідно до місцевих правил.

### ПОСИЛАННЯ

1. Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1988. P.1393-1401.

### КОНТРОЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Лот №:	Термін придатності	Тестове значення [ммоль/л]	Діапазон [ммоль/л]
<b>25325</b>	<b>2019-05</b>	<b>20.0</b>	<b>16.0-24.0</b>



### ВИРОБНИК

Діалаб ГмбХ  
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351 Вінер-Нойдорф  
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,  
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,  
e-mail: [office@dialab.at](mailto:office@dialab.at)



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

