

# ФЕРМЕНТНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ РОЗЧИН DIATRO CLENZ CC

## Diatro Clenz CC

Кат. №: **D6051**

Дата випуску інструкції: **30-03-2022**  
Версія **4.2**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### **Diatro-Clenz CC**

Концентрат ферментного очищуючого розчину для автоматизованого аналізу

Код продукту: **D6051** 100 мл (mL)

Тільки для використання в *in vitro* діагностиці

### **ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ**

Концентрат ферментного очищуючого розчину Diatro-Clenz CC являє собою стабілізований і мікрофільтрований протеолітичний ферментний розчин для регулярного автоматизованого очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на всіх гематологічних аналізаторах.

Концентрат ферментного очищуючого розчину Diatro-Clenz CC слід використовувати тільки з реагентами Diatron. Помилкові результати можуть бути отримані, якщо реагент застосовується з реагентами від іншого виробника.

Будь ласка, зверніться до керівництва користувача приладу для отримання додаткової інформації.

### **ІНГРЕДІЄНТИ**

ПАР ..... < 30.0 %  
Протеолітичні ферменти ..... < 5.0 %  
Консервант ..... < 1.5 %  
Стабілізатори ..... < 25.0 %  
у неіонізованій воді

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Концентрат ферментного очищуючого розчину Diatro-Clenz CC не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить азиду.
- Уникати контакту з очима, шкірою та одягом.
- У разі потрапляння в очі або на шкіру промити очі великою кількістю води протягом декількох хвилин або вимити шкіру водою.
- Зберігати контейнер з реагентом закритим, коли він не використовується.
- Одягти лабораторні рукавички при роботі з реагентом.
- Всі зразки біологічних рідин повинні розглядатися як потенційно інфекційний матеріал. Розглядати всю кров і інші потенційно інфіковані матеріали з відповідними пересторогами. Використовуйте рукавички, маски і халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до листа безпеки, пов'язаного з реагентом.
- Дотримуйтесь правил належної лабораторної практики (GLP) під час роботи з реагентами.

### **ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА**

Концентрат ферментного очищуючого розчину Diatro-Clenz CC призначений для використання із зразками крові, зібраними венепункцією в ЕДТА антикоагулянт. Зразки для гематологічного аналізу можуть зберігатися до 8 годин при температурі 15-30 °C (°C) або до 24 годин після збору в холодильнику (2-8 °C (°C)).

### **ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТУ**

- Цей реагент готовий до використання і може бути застосований безпосередньо з контейнера; ніякої спеціальної підготовки реагенту не потрібно.
- Залиште реагент при кімнатній температурі протягом не менше 12 годин.

### **ЗАСТОСУВАННЯ РЕАГЕНТУ**

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Під час щоденної процедури догляду аспіруйте миючий засіб через зонд. Виконайте цикл очищення, як зазначено в посібнику користувача приладу.
- Якщо результати бланк-вимірювання занадто високі або з'являються неприйнятні результати, піпетуйте концентрований реагент безпосередньо в відповідну камеру згідно з інструкцією користувача приладу. Зачекайте, щоб провести ефективну очистку і провести вимірювання бланка.

### **ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТУ**

- Зберігати Концентрат ферментного очищуючого розчину Diatro-Clenz CC при температурі від +4 до +32 °C (°C).
- Термін придатності Diatro-Clenz CC становить 24 місяці з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Не використовувати реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Викинути відкритий контейнер через 120 днів.
- Не використовувати реагент після заморожування.
- Утилізувати відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.

У разі будь-яких проблем зверніться до місцевого офіційного дистриб'ютора Diatron для усунення несправностей.



Небезпека

H290, H315, H318,  
P280, P302+P352, P305+P351+P338,  
P310, P390



### **ВИРОБНИК**

ДІАТРОН МІ PLC  
вул. Таблас, 39  
Н-1097 Будапешт, Угорщина  
Тел.: +36 14369800  
Факс: +36 14369809  
www.diatron.com



### **УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК**

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

