

КАЛІБРАТОР ДЛЯ ХОЛЕСТЕРИНУ ЛпВГ/ЛпНГ

HDL/LDL-Cholesterol Calibrator

Каталог. №: F14715SV

Дата випуску інструкції: 2015/01/13
Версія 01



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Ліофілізований калібратор людського походження для використання в тестах з метою кількісного in-vitro визначення ліпопротеїнів високої щільності Холестерину (HDL-C) та ліпопротеїнів низької щільності Холестерину на фотометричних системах.

Кат. №: F14715SV
Вміст: 1 x 3 мл
Одиничний флакон

СКЛАД КАЛІБРАТОРА

ЛпВГ- та ЛпНГ –холестерин у людській сироватці.

ПІДГОТОВКА КАЛІБРАТОРА

- Відкрийте флакон дуже обережно, уникаючи втрати ліофілізованого матеріалу.
- Додати точно 3 мл деіонізованої або дистильованої води (неточне відновлення контролю і помилка в методиці проведення аналізу можуть привести до помилкових результатів).
- Закрити флакон ретельно і повністю розчинити вміст обережними періодичними перемішуваннями, уникаючи утворення піни. Не трясіть!

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ КАЛІБРАТОРА

Зберігання: При 2 - 8 °C

Стабільність: до закінчення терміну придатності вказаного на етикетці

Стабільність після відновлення:

7 днів при температурі 2 – 10 °C

Закривати негайно після використання!

Не використовуйте продукт, якщо є видимі ознаки росту мікробів у флаконі. Неправильна обробка і/або зберігання калібратора можуть вплинути на результати.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- При контакті калібраторів з ротом, очима або шкірою, негайно промийте великою кількістю води. За потреби - зверніться до лікаря.
- Цей продукт виготовлений з людської сироватки, яка виявилася негативною до HbsAg, анти-HIV 1 та 2 антитіл та анти-HCV антитіл. Оскільки, жодне тестування не може гарантувати те, що продукти, отримані з людських сироваток, не передають інфекційних агентів, тому рекомендується застосовувати ті ж самі запобіжні заходи, які використовуються для зразків пацієнтів.
- Будьте обережні, щоб не порізатися з алюмінієвою кришкою при видаленні її з флакону.

КАЛІБРУВАЛЬНІ ДАНІ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

ЛОТ:	03L15	
Термін придатності:	2017/04	
	ЛпВГ- холестерин	ЛпНГ-холестерин
Значення:	53.5 мг/дл	122 мг/дл
Відстежування:	ReCCS (JCCRM224)	CDC Референсний метод (BQ)

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, дотримуйтесь місцевих вимог.



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної
продукції та лабораторних приладів в ІЗ
НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обдъект М55, 2351
Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

