

КАЛІБРАЦІЙНА ПЛАЗМА НОРМАЛЬНА

CALIBRATION PLASMA NORMAL

Кат. №: **K-720**

Дата випуску інструкції: **01-2008**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

CALIBRATION PLASMA NORMAL

10 x 1 мл

Кат. № K-720

Калібрувальні плазми отримують з плазми людини, взятої з < 0.1% антикоагулянту цитрату натрію.

ВІДНОВЛЕННЯ

Обережно відкрити флакон і додати точно 1 мл дистильованої води, закрити ємність і залишити на 15 хвилин при кімнатній температурі.

Флакон не перевертати і не трясти.

Використовувати тільки після повного відновлення.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

1. Ліофілізовані калібрувальні плазми залишаються стабільними при зберіганні при температурі -25 °С до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.
2. Відновлені плазми стабільні протягом 2 годин при зберіганні в закритому флаконі при 2-8 °С.

ПРОЦЕДУРА

Використовувати КАЛІБРУВАЛЬНУ НОРМАЛЬНУ ПЛАЗМУ для встановлення стандартних кривих при проведенні аналізів Фактора або як контроль якості для перевірки стандартних кривих, побудованих для інших цілей.

Використовувати згідно з інструкціями до інструментарію і реагентів, що використовуються для кожного Фактора коагуляції.

ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ

Значення аналізу надаються для кожної партії. Однак, отримані результати багато в чому залежать від використовуваних стандарту, реагентів, інструменту та процедур проведення, встановлених кожною лабораторією. Кожна лабораторія повинна провести оцінку цих продуктів, використовуючи власну систему реагентів і методику встановлення прийнятних діапазонів.

ЗАУВАЖЕННЯ

- Продукт призначений тільки для використання в in-Vitro діагностиці.
- Реагенти повинні бути використані в належних цілях тільки кваліфікованим персоналом, в належних лабораторних умовах.
- Кожна складова вихідного матеріалу, використаного в приготуванні даного продукту, була протестована і знайдена такою, що не реагує на поверхневий антиген вірусу гепатиту В і негативною до антитіл до ВІЛ і вірусу гепатиту С.
- Звертатися як з потенційно інфекційним матеріалом.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Посилатися на місцеві легальні вимоги до знищення відходів.



ВИРОБНИК

ПЗ КОРМЕЙ С.А.

вул. Віосенна, 22

05-092 м. Ломянкі, Польща

тел.: +48 (0) 81 749 44 00

факс: +48 (0) 81 749 44 34

<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»

вул. Чорновола, 97

м. Івано-Франківськ, 76005

тел.: +38 (0342) 775 122

факс: +38 (0342) 775 123

e-mail: info@diameb.ua

www.diameb.ua

