

ПРОБІРКИ ДЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ ВЗІРЦІВ СТИЛЬЦЯ

Stool Extraction Tubes

Кат. №: **ORG 282**

Дата випуску інструкції: **2018-01-02**

Версія 1



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

НАЗВА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

Пробірки для екстракції зразків стільця є додатком для екстракції зразків стільця, які будуть використовуватися для аналізу з ORGENTEC аналізами стільця (ORG 280, ORG 284, ORG 286, ORG 580).

Призначений тільки для професійного використання в лабораторії.

СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ЕТИКЕТКАХ



Виробник



Обмеження температури



Каталоговий номер



Звернутися до інструкції з використання



100 Достатньо для 100 випробувань



Не використовувати повторно



Код партії



282_1 Електронна інструкція з використання: версія

ВМІСТ



ORG 282 Достатньо для 100 застосувань
Набір містить 100 штук пробірок для екстракції зразків стільця упакованих в дві частини:
Частина А: 100 порожніх прозорих пробірок
Частина В: оранжеві дозувальні лопатки з синьою конусною вставкою

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

- Обробляйте зразки стільця як потенційно небезпечний матеріал.
- Утилізуйте використані екстракційні пробірки як потенційно інфекційні відходи. Не використовуйте повторно.
- Утилізуйте не використані екстракційні пробірки як пластикові відходи.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

- Зберігати при кімнатній температурі від 10 - 30 °С.


НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ

- Використовуйте екстракційний буфер з відповідного аналізу стільця ORGENTEC, наприклад, F5126 Екстракційний буфер для зразків стільця. F5126 також доступний окремо.
- Вихровий змішувач
- Не використовуйте компоненти набору після закінчення терміну придатності.
- Всі матеріали слід привести до кімнатної температури (20-28°C) перед використанням.
- Для запобігання забруднення міняйте наконечники піпетки між зразками.

ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ СТИЛЬЦЯ

Прочитайте інструкцію щодо використання відповідного набору ORGENTEC для аналізу стільця.

ПРОЦЕДУРА ЕКСТРАКЦІЇ

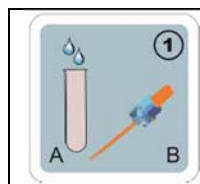

1 Підготуйте пробірку

Заповніть екстракційний буфер у прозору пробірку (частина А).
Об'єм вказаний в інструкції з використання відповідного ORGENTEC аналізу калу.




2 Відокремте лопатку

Витягніть оранжеву дозувальну лопатку з блакитного конусного ковпачка (частина В). Закрутіть блакитний конусний ковпачок на пробірку (частина А).



3 Наберіть зразок стільця

Наберіть зразок калу, оранжевою дозувальною лопаткою. Виїмки лопатки повинні повністю бути вкриті зразком калу. Отримаєте приблизно 15 мг калу. Протріть оранжеву лопатку папером, щоб видалити надлишки калу. Вставте оранжеву дозувальну лопатку в блакитний ковпачок пробірки. Надлишок калу можна вилучити конусним ковпачком.

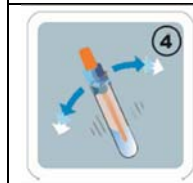

4 Екстракція

Добре перемішайте або покрутіть для видалення зразка калу з виїмок шпателя. Інкубуйте та продовжуйте діяти відповідно до інструкції з використання ORGENTEC щодо даного аналізу.

Важливі нагадування

- Зразки калу потрібно використовувати при кімнатній температурі.
- Неоднорідні зразки потрібно гомогенізувати перед забором, наприклад, за допомогою петлі для інокуляції.
- Рекомендуємо: зважувати рідкі зразки калу (15мг).
- Рекомендуємо: негайно аналізувати отримані зразки калу або зберігати відповідно до інструкції з використання ORGENTEC для аналізу калу.



ВИРОБНИК

ОРДЖЕНТЕК Діагностика ГмбХ
Карл-Цайс-Штрассе 49-51
55129 Майнц-Німеччина
Телефон: +49(0) 61 31/92 58-0
Факс: +49 (0) 61 31/92 58-58
Інтернет: www.orgentec.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com

