

CORMAY IMMUNO-MULTICAL

МУЛЬТИКАЛИБРАТОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ



CORMAY IMMUNO-MULTICAL 5 x 1 мл Кат.№ 4-287

НАЗНАЧЕНИЕ

CORMAY IMMUNO-MULTICAL предназначается для использования как мультианалит-калибратор при измерении различных белков в сыворотке человека. Используйте в соответствии с инструкциями к реагентам для определения специфических белков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CORMAY IMMUNO-MULTICAL является человеческой жидкостью с буфером HEPES (рН 7,4), содержащей стабилизаторы, азид натрия (<1 г/л) и следующие белки человека: альбумин, альфа-1 антитрипсин, альфа-1 кислый гликопротеин, альфа-2 макроглобулин, антитромбин III, комплемент C3, комплемент C4, церулоплазмин, гаптоглобин, IgA, IgG, IgM, преальбумин и трансферрин.

ПОДГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ

Калибраторы готовы к использованию.

При 2-8°C калибраторы стабильны до даты, указанной на упаковке. Храните закрытыми, избегайте контаминации.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Продукт только для диагностики in vitro.
2. Калибраторы должны использоваться только по назначению, квалифицированным лабораторным персоналом в соответствующих лабораторных условиях.
3. Этот калибратор был протестирован на антитела к ВИЧ, HBsAg и HCV и оказался неактивным. Однако с этим материалом следует обращаться как с потенциально инфицированным.
4. Калибраторы содержат азид натрия (< 1 г/л) в качестве консерванта. Избегайте контакта с кожей и слизистыми оболочками.

ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Заданные значения по специфическим белкам меняются от лота к лоту и прилагаются на отдельном листе.

Отслеживаемость значений

Значения задаются по контрольному материалу ERM DA470k/IFCC.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В соответствии с местными требованиями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Johnson, A.M.: A new international preparation for proteins in human serum, Arch. Pathol. Lab. Med. 117 (1993) 29-31.

Дата выхода: 05. 2009

MANUFACTURER

PZ CORMAY S.A.
ul. Wiosenna 22,
05-092 Łomianki, POLAND
tel.: +48 (0) 22 751 79 10
fax: +48 (0) 22 751 79 14
<http://www.pzcormay.pl>

05/09/10/09