



Контроли для определения гемоглобина A_{1c}

Каталог. № : 4-319
Количество : 4 x 0,25 мл
Производитель: Cormay (Польша)

Внимание: основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке.

Методика от 11-2008

РЕАГЕНТЫ

Набор	CORMAY HbA _{1c} Controls
КОНТРОЛЬ 1	2 x 0,25 мл
КОНТРОЛЬ 2	2 x 0,25 мл
РАСТВОРИТЕЛЬ	1 x 2 мл

РАЗВЕДЕНИЕ

Осторожно откройте флакон (КОНТРОЛЬ 1 или КОНТРОЛЬ 2) и добавьте ровно 0,25 мл реагента РАСТВОРИТЕЛЯ. Закройте бутылочку, прокачайте и оставьте на 15 минут при комнатной температуре. После 15 минут перемешайте до образования однородного раствора.

СТАБИЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЕ

Если хранить реагенты при 2-8°C они остаются стабильными до окончания срока годности, указанного на упаковке.

Разведенный контроль стабилен в течении 3 месяцев если хранить при 2-8 °C.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Продукт предназначен для использования только в диагностике „in vitro”.
2. Не замораживать разведенные контроли.
3. Не пипетировать ртом.
4. Материалы человеческого происхождения, из которых изготовлен этот продукт был протестирован на ВИЧ антитела, гепатит В и С и оказался нереактивным. Однако, с данным материалом необходимо обращаться как со способным передавать инфекционные болезни.
5. РАСТВОРИТЕЛЬ содержит 0,09% азиды натрия как консерванта. Избегайте контакта с кожей и слизистыми.
6. При проведении анализа на HbA_{1c} разведение контролей потребует приготовления согласно инструкции на определение HbA_{1c}.

ПРИПИСАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

КОНТРОЛЬ	Партия	ЦЕЛЕВЫЕ	ДИАПАЗОН
1	811-12	5,65 % HbA _{1c}	4,52-6,78 % HbA _{1c}
2	811-12	12,06 % HbA _{1c}	9,65-14,47 % HbA _{1c}

УНИЧТОЖЕНИЕ ОТХОДОВ

Следуйте вашим местным юридическим требованиям.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

ЧМП «ДИАМЕБ»
Ул. Чорновола, 97, г. Ивано-Франковск, 76005
Тел.: (0342) 775122
Тел/факс: (0342) 775612
E-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

