

# КАЛИБРАТОР ПРОТЕИНА НИЗКИЙ

## A00701, PROTEIN CALIBRATOR LOW

Каталог. № : A00701  
Производитель: *Dialab, (Австрия)*

Методика от 11-2012  
Версия 02



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

**Жидкий калибратор на основе человеческого материала для использования при калибровке в иммунотурбидиметрических анализах**

Кат. №	Содержимое	
A00701	1 x 1 мл	Калибратор протеина Низкий
A00702	1 x 5 мл	Калибратор протеина Низкий

### СОСТАВ

Калибратор протеина Низкий основан на дефибринированной человеческой плазме, жидкостно стабилизирован и профильтрован через фильтр с размером пор 0,2µ.  
Консервант: 0,095 % азид натрия.

### ПОДГОТОВКА

Калибратор жидкий и готов к использованию.

### СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Хранение: при 2 – 8 °С  
Стабильность: до окончания срока годности  
Стабильность после вскрытия: до 6 недель при 2 – 8 °С  
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

### УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Используйте калибратор в тот же способ, что и реагент и/или аппарат.
- Позвольте калибратору достичь комнатной температуры (22 – 28 °С) перед использованием.
- Калибратор не должен оставаться в течение длительных периодов времени (до 6 часов) при комнатной температуре. Держите неиспользуемые флаконы все время плотно закрытыми, чтобы избежать микробиологического загрязнения. Неиспользуемые флаконы храните в холодильнике.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Этот продукт предназначен только для диагностики In Vitro.
- Каждый образец крови, предназначенный для использования в производстве белкового калибратора, испытывали на поверхностный антиген гепатита В (HBsAg), анти гепатита С (анти-ВГС) и антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 по FDA требуемым испытаниям. Поскольку ни один тест не может гарантировать, что продукты, полученные из крови человека, не содержат ВИЧ-1/2 и вирусы гепатита В и гепатита С, этот материал и все пробы пациентов следует считать инфекционно опасными.
- Реагенты, содержащие азид натрия, должны быть обработаны с должной осторожностью: Не глотать и не допускать контакта с кожи или слизистыми оболочками! Азид натрия может образовывать взрывоопасные азиды при контакте с тяжелыми металлами, такими как медь или свинец.

### УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Ссылаться на местные легальные требования по уничтожению отходов.

**ДАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПАРТИИ НАБОРА**  
Значения и срок годности зависят от ПАРТИИ набора.

Таблицу см. в оригинале инструкции.



### ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»  
ул. Черновола, 97  
г. Ивано-Франковск, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)