

КОНТРОЛЬ ЛИПОПРОТЕИНА ВЫСОКИЙ



A00816, A00817, Lp(a) Control High

Каталог. № : **A00816, A00817**
Производитель: **Dialab, (Австрия)**

Методика от **11-2012**
Версия **03**

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

ООО «ДИАМЕБ»
ул. Чорновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com

Жидкий контроль на основе человеческого материала для использования в иммунотурбидиметрических анализах

Кат. №	Содержимое
A00816	1 x 1 мл Контроль Lp(a)
A00817	1 x 5 мл Контроль Lp(a)

СОСТАВ

Контроль Высокий Lp(a) Диалаб является дефибринированным и делипидированным сывороточным фосфатным буферным раствором. Также содержит 0,095 % азида натрия.

ПОДГОТОВКА

Контроль жидкий, готов к использованию.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Хранение: при 2 – 8 °С
Стабильность: до окончания срока годности
Стабильность после вскрытия: до 6 недель при 2 – 8 °С
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Используйте контроль в тот же способ, как требуется по отношению к реагенту и/или аппарату.
- Перед использованием позвольте контролю достичь комнатной температуры (22–28°C).
- Контроль не должен оставаться в течение длительных периодов времени (до 6 часов) при комнатной температуре. Держите неиспользуемые флаконы все время плотно закрытыми, чтобы избежать микробиологического загрязнения. Неиспользуемые флаконы храните в холодильнике.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Для применения в диагностике in vitro.
- Каждая отдельная порция донорской крови, использованная для изготовления протеинового контроля, оказалась нереактивной во время проверки утвержденными FDA методами на HbsAg, анти-HCV и анти-ВИЧ, и анти-ВИЧ 1+2. Поскольку нет возможности окончательно исключить передачу продуктами человеческой крови носителей инфекций, рекомендуется обращаться с этим материалом и всеми образцами пациентов, как со способными передавать инфекционные болезни.
- С реагентами, содержащими азид натрия, обращаться с особой осторожностью. Не вдыхать и избегать контакта с кожей или слизистыми.

РЕГУЛИРОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Ссылайтесь на Ваши местные требования законодательства.

ДАнные ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПАРТИИ НАБОРА

Значения и срок годности зависят от ПАРТИИ набора.
См. данные таблицы по определенной партии.

Серия №: C4058	Срок годности: 2016/12	
Параметр	Значение	Диапазон
Lp(a)	40.3 мг/дл	32.2 – 48.4 мг/дл

Значения прослеживаются по Международному Стандарту для Липопротеина (a) SRM 2B.