

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ МОЧА 1 И 2 УРОВНЯ

D08581, D08582, DIACON URINE LEVEL 1&2

Каталог. № : **D08581, D08582** Методика от **05-02-2008**
Производитель: **DIALAB (Австрия)** Версия **01**



Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

Жидкая универсальная контрольная моча для применения в контроле достоверности и точности анализов при количественном определении *in vitro* на фотометрических системах различных аналитов

Каталог. №	Содержимое		
D08581	12 x 5 мл	Уровень 1	Полный набор
D08581SV	1 x 5 мл	Уровень 1	Флаконы с этикетками
D08581VSV	1 x 5 мл	Уровень 1	Флаконы без этикеток (OEM)
Каталог. №	Содержимое		
D08582	12 x 5 мл	Уровень 2	Полный набор
D08582SV	1 x 5 мл	Уровень 2	Флаконы с этикетками
D08582VSV	1 x 5 мл	Уровень 2	Флаконы без этикеток (OEM)

СОСТАВ

Diacon Urine Level 1&2 является жидким контролем мочи человеческого происхождения. Он насыщен амилазой человеческой слюны, ХГЧ из человеческой мочи, и альбумином человеческой и бычьей сыворотки.

Контроли содержат стабилизаторы.

ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЯ

- Контроли жидкие и готовы к использованию. Тщательно перемешать содержимое флакона перед каждым использованием путем осторожного переворачивания в течение 5 минут.
- Открыть флакон и перенести необходимое количество контроля в чистую лунку.
- Заменить крышку сразу же и хранить флакон при 2-8°C.

За указаниями по эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к вкладышу в упаковке реагента.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Хранение: при 2 – 8°C
Стабильность: до окончания срока годности

НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЫТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Повышенная мутность и/или характерный запах указывают на рост микроорганизмов.

Не использовать изделие при явной видимости микробиологического роста во флаконе.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Неправильное обращение и/или хранение контролей может повлиять на результаты.

ДАнные СЕРИИ АНАЛИЗА

Значения и срок годности зависят от серии.
См. таблицу с данными серии изделия.

ЗНАЧЕНИЯ И ДИАПАЗОНЫ АНАЛИЗА

Приписанные целевые значения основаны на анализах репликатов репрезентативных образцов в лабораториях при использовании настоящего изделия.

Значения и диапазоны анализа, предоставлены по каждому указанному аналиту, получены с использованием реагентов Dialab или реагентов из других производителей.

Значения были установлены на аппаратах и реагентах производителя, имеющих на момент анализа. Последующие изменения аппарата или реагента могут привести к аннулированию установленных значений.

Приемлемые диапазоны были рассчитаны как приписанное значение \pm максимально допустимое отклонение одного значения в соответствии с указаниями Федерального медицинского совета Германии (Rilibäk) от 2003 года. Для аналитов, не

перечисленных в Rilibäk, диапазоны даются как \pm 20% от целевого значения.

Рекомендуется, чтобы каждая лаборатория устанавливала свое собственное среднее значение для этого контроля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Компоненты DIACON URINE, изъятие из материала человеческого происхождения, оказалась не реактивной во время проверки утвержденными методами на HbsAg, анти-ВИЧ, и анти-ВИЧ 1+2. Поскольку нет возможности окончательно исключить передачу продуктами человеческой крови носителей инфекции, рекомендуется обращаться с контролем, соблюдая те же предосторожности, что и при обращении с образцами пациентов.

РЕГУЛИРОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Ссылайтесь на Ваши местные требования законодательства.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул. Чорновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com