



## КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Могут быть использованы все контрольные сыворотки со значениями Общего протеина, полученными данным методом.

Мы рекомендуем:

Кат. №	Состав		
D98481	12 x 5 мл	DIACON N	Нормальный контрольный образец сыворотки
D98482	12 x 5 мл	DIACON P	Абнормальный контрольный образец сыворотки

## КАЛИБРОВКА

Анализ требует использования Стандарта или Калибратора Общего Протеина.

Мы рекомендуем:

Кат. №	Состав		
D94683	1 x 3 мл	СТАНДАРТ ОБЩЕГО ПРОТЕИНА	
D98485	5 x 3 мл	DIACAL AUTO	Мультикалиброванный Образец сыворотки

## АВТОМАТИЗАЦИЯ

Специальные приспособления для автоматизированных анализаторов могут быть сделаны под заказ.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Реагент 1 и Реагент 2:  
S24/25: Избегать контакта с кожей и глазами.
2. Реагент 2 вызывает раздражение: Xi  
R36/38: вызывает раздражение глаз и кожи.  
R52/53: вредный для водных организмов, может вызвать долгосрочное отрицательное воздействие в водной среде.  
S2: Хранить в недоступном для детей месте.  
S25: Избегать контакта с глазами.  
S26: В случае контакта с глазами, промыть немедленно с большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.  
S37/39: использовать защитную одежду и защиту для глаз.  
S61: избегать выбросов в окружающую среду. Следовать инструкциям по уничтожению.
3. В образцах сыворотки или плазмы от пациентов, получивших большие количества полидекстранса внутривенно, очень высокие значения могут быть получены методом Biuret. В таких случаях альтернативные методы (например, Kjeldahl) должны использоваться.
4. Реагенты содержат гидроксид натрия. Не глотать! При попадании реагентов на кожу или слизистую немедленно промыть водой!
5. Пожалуйста, придерживайтесь инструкций по безопасности и соблюдайте необходимые меры безопасности при использовании лабораторных реактивов.

## УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

Ссылаться на местные легальные требования по уничтожению отходов.



### ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»  
ул.Чорновола, 97  
г. Ивано-Франковск, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)