

MAGLUMI™ Концентрат для промивання

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Концентрат для промивання MAGLUMI призначений для розведення в процесі приготування системної рідини, яка використовується для промивання магнітних мікросфер у повністю автоматичному хемілюмінесцентному імуноаналізаторі серії (ХЛА) MAGLUMI (включаючи Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 1000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000, Maglumi 4000 Plus і MAGLUMI X8).

2. НАДАНИ МАТЕРІАЛИ

Концентрат для промивання MAGLUMI (REF: 130299005M):
1 × 0,714 л

Кожна пляшка містить концентрований буферний розчин Tris-HCl для 750 аналізів, котрий слід розводити в пропорції 1:14.

Додаткову інформацію, зокрема щодо порядку виконання аналізів MAGLUMI, наведено в інструкціях до відповідних аналізів.

* Кількість аналізів може бути іншою залежно від умов роботи.

3. ПІДГОТОВКА

- Вміст однієї пляшки концентрату для промивання MAGLUMI вилийте в ємність об'ємом 10 л.
- Повільно долийте очищену воду до відмітки 10 л. Використовуйте лише очищену воду згідно зі стандартом ASTM D1193-06 (2011), тип IV, клас C.
- Повільно перемішайте рідину.
- Уникайте утворення піни!**
- В ємність можна зливати залишки або постійно доливати готову до використання системну рідину за умови, що її миють один раз на тиждень.
- Під час переливання уникайте утворення піни.

4. ЗБЕРІГАННЯ Й ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

- Зберігання концентрату для промивання: при температурі 2–30 °C до закінчення зазначеного на упаковці терміну придатності (12 місяців від дати виробництва).
- Термін придатності готової до використання системної рідини: 4 тижні при температурі 2–30 °C.
- Бережіть від прямих сонячних променів.**

5. ПРОМИВАННЯ ЄМНОСТІ

- Ємність необхідно мити з 1-відсотковим розчином гіпохлориту натрію (рекомендовано раз на тиждень).
- Перш ніж очистити ємність, злийте залишки рідини.
- Налийте в ємність 2 л 1-відсоткового розчину гіпохлориту натрію.
- Закрийте ємність.
- Струшуйте ємність рухами вперед і назад.
- Злийте рідину й промийте ємність не менше трьох разів очищеною водою.
- Використовуйте лише очищену воду згідно зі стандартом ASTM D1193-06 (2011), тип IV, клас C.

6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

- ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ**
- Дотримуйтесь звичайних запобіжних заходів, необхідних для роботи з усіма лабораторними реагентами.
- Усі відходи після миття слід утилізувати як потенційно небезпечні біологічні матеріали.
- Утилізація всіх відходів виконується відповідно до місцевих правил.
- Уникайте потрапляння на шкіру та слизові оболонки.
- Паспорти безпеки речовин надаються на вимогу.



Шеньчжень Нью Індастріз Біомедікал Інжинірінг Ко., Лтд.

№23 Джінксіу Еаст Роад, Пінгшан Дістрікт, 518122 Шеньчжень, Китайська Народна Республіка
Тел: +86 755 21536601 Факс: +86 755 28292740



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (Німеччина)
Тел.: +49 40 251 31 75 Факс: +49 40 25 57 26



Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Кратія Медтехніка», вул. Баговутівська, 17-21, 04107, м. Київ, Україна.
Тел.: 0 800 21-52-32 (безоплатно можуть телефонувати абоненти фіксованого та мобільного телефонного зв'язку з будь-якої точки України).
Електронна пошта: uaer@cratia.ua

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

	Див. інструкцію з використання		Виробник
	Температурний діапазон (зберігати при температурі 2–30 °C)		Кінцева дата терміну придатності
	Цим боком догори		Бережіть від прямих сонячних променів
	Медичний виріб для діагностики in vitro		Уповноважений представник в Європейському союзі
	Номер за каталогом		Склад набору
	Код партії		Знак відповідності технічним регламентам

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: Липень 2020 року.