

# MAGLUMI® Промивний розчин для очищення системи трубок

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Розчин для чищення труб системи MAGLUMI використовується для чищення пристрою піпетування та голок мийного блока. Він допомагає скоротити до мінімуму перенос реагенту завдяки зменшенню осадження білка в трубах і спростити планове технічне обслуговування системи MAGLUMI. Набір може використовуватися тільки для повністю автоматичних хемілюмінесцентних імуноаналізаторів (ІХЛА) MAGLUMI (включаючи Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 1000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000, Maglumi 4000 Plus і MAGLUMI X8) з програмою чищення труб.

## 2. НАДАНІ МАТЕРІАЛИ

**Розчин для чищення труб системи (REF: 130299007M):**

пляшка 500 мл, що містить гіпохлорит натрію.

**Один пустий блок реагентів із 7 відсіками:**

лише три порожні відсіки поряд з ручкою набору призначені для розчину для чищення труб; максимальний об'єм кожного з них – 25 мл.

## 3. ЧАСТОТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розчин для чищення труб системи MAGLUMI використовується на завершальному етапі робіт зі щомісячного технічного обслуговування системи.

Кількість розчину достатня для 12 циклів чищення. Технічне обслуговування з розчином для чищення труб системи MAGLUMI не замінює собою регулярний догляд за системою MAGLUMI.

Деякі набори MAGLUMI можуть потребувати частішої обробки розчином для чищення; крім того, якщо робоче навантаження на імуноаналізатор дуже велике, виконувати обслуговування слід щотижня.

## 4. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

- Вставте блок реагентів, заповнений розчином для чищення труб системи MAGLUMI, у доріжку 1 зони реагентів.

- Запустіть програму чищення труб у програмному забезпеченні.

Для одного циклу миття: перелийте розчин для чищення труб системи MAGLUMI з пляшки в 3 порожні відсіки блока реагентів поряд з ручкою набору. Щоразу додавайте в блок реагентів 13 мл рідини.

Для двох циклів миття: перелийте розчин для чищення труб системи MAGLUMI з пляшки в 3 порожні відсіки блока реагентів поряд з ручкою набору. Щоразу додавайте в блок реагентів 25 мл рідини.

- Для виконання процедури потрібно приблизно 40 хвилин.

## 5. ЗБЕРІГАННЯ

- Після отримання зберігайте набір при температурі 2–30 °С.

- Бережіть від прямих сонячних променів. Термін придатності розчину становить 12 місяців.

## 6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

- Призначено для діагностики *In Vitro*.


- Перед використанням розчину для чищення труб системи MAGLUMI уважно ознайомтеся з робочою інструкцією.

- Не допускайте сильного струшування, щоб уникнути утворення піни.

- Усі рідкі відходи слід утилізувати як потенційно небезпечні біологічні матеріали. Вони мають вважатися такими, що можуть переносити збудників інфекції, тому їх слід утилізувати згідно з чинним законодавством та рекомендаціями установ, які мають повноваження компетентних органів влади в певній юрисдикції.

- У разі потрапляння бризок розчину в очі негайно промийте їх водою; якщо ви проковтнули рідину, пийте багато води і негайно зверніться по медичну допомогу.

Згідно з Постановою ЄС 1272/2008 (Регламент щодо правил класифікації, маркування та упаковки речовин та сумішей) небезпечні реагенти підлягають класифікації та маркуванню, як описано нижче:

РЕАГЕНТИ:	Розчин для чищення труб системи
КЛАСИФІКАЦІЯ:	Подразнює шкіру, категорія 2
СИГНАЛЬНЕ СЛОВО:	Попередження
СИМВОЛИ / ПІКТОГРАМИ:	 GHS07 Знак оклику
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕБЕЗПЕКИ:	H315 Викликає подразнення шкіри.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:	<p>R264: ретельно мийте руки після роботи.</p> <p>R280: надягайте захисні рукавички / захисний одяг / захисні окуляри / щиток для захисту обличчя.</p> <p>R302+P352: У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: промийте великою кількістю води з милом.</p> <p>R362: зніміть забруднений одяг.</p>
МІСТИТЬ: (лише речовини, вказані в статті 18 Регламенту ЄС 1272/2008).	Гіпохлорит натрію, розчин 2,0-4,7 % Cl активний



**Шеньчжень Нью Індастріз Біомедікал Інжинірінг Ко., Лтд.**

№23 Джінксіу Еаст Роад, Пінгшан Дістрікт, 518122 Шеньчжень, Китайська Народна Республіка  
Тел.: +86 755 21536601 Факс: +86 755 28292740



**Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (Німеччина)  
Тел.: +49 40 251 31 75 Факс: +49 40 25 57 26



**Уповноважений представник в Україні:**

ТОВ «Кратія Медтехніка», вул. Багговутівська, 17-21, 04107, м. Київ, Україна.  
Тел.: 0 800 21-52-32 (безоплатно можуть телефонувати абоненти фіксованого та мобільного телефонного зв'язку з будь-якої точки України).  
Електронна пошта: uaгер@cratia.ua

**ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ**

	Див. інструкцію з використання		Виробник
	Температурний діапазон (зберігати при температурі 2–30 °C)		Кінцева дата терміну придатності
	Цим боком догори		Бережіть від прямих сонячних променів
	Медичний виріб для діагностики in vitro		Уповноважений представник в Європейському союзі
	Номер за каталогом		Склад набору
	Код партії		Знак відповідності технічним регламентам

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: Липень 2020 року.