

ІМІДАЗОЛ БУФЕРНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ КОАГУЛЯЦІЙНИХ ТЕСТІВ

21180, Dia-IMIDAZOL

Каталог. №: 21180

Методика від 05-2008

Виробник: **Diagon** (Угорщина)



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

ПРИЗНАЧЕННЯ

(Тільки для діагностики In Vitro)

Dia-IMIDAZOL призначений для тестів на гемостаз, таких як фібриноген (FIB).

АКТИВНІ ІНГРІДІЄНТИ

Dia-IMIDAZOL – буферний розчин із стабілізатором.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Розчин містить азид натрію. Він може утворити металеві азиди, які можуть бути потенційно вибухово небезпечними, у металевих трубках. Вживайте відповідні застережні міри!
- З біологічними матеріалами, зразками та всіма матеріалами, з якими відбувається контакт, слід поводитися, як з такими, які здатні передавати інфекцію та вживати належні запобіжні заходи.
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, надруковано на етикетці.
- Уникайте мікробного забруднення реагенту, щоб не спричинити помилкові результати.

ПІДГОТОВКА

- Розчин Dia-IMIDAZOL готовий до використання.
- Всі реагенти, відходи та використане одноразове лабораторне обладнання слід розглядати як небезпечні відходи. Їх слід обробляти та утилізувати відповідно до чинних правил щодо обробки небезпечних матеріалів.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

Дійте відповідно до інструкції, розміщеної всередині упаковки з Фібриногеном для параметрів тесту.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Невідкриті флакони Dia-IMIDAZOL стабільні до дати закінчення терміну при зберіганні при температурі 2-8 °С. Дивіться етикетку упаковки, щоб дізнатися термін придатності. Відкритий флакон стабільний 5 днів при температурі 16 °С. Не заморожувати!

ОБМЕЖЕННЯ

Особа, яка встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним фахівцем.

НЕНАДАНІ ПОТРІБНІ МАТЕРІАЛИ

Dia-IMIDAZOL рекомендується використовувати з наступними скринінговими тестами гемостазу:

- Фібриноген (Dia-FIB, Кат. №61060)



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com



© Переклад на українську мову ТОВ «ДІАМЕБ»