

ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН АКЦЕНТ-200

ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION

Кат. №: 3-108

Дата випуску інструкції: 10-2023



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва реагента	Варіант	Кат. №
ACCENT-200 ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН	3x35 мл (ml)	3-108

ПРИЗНАЧЕННЯ

ACCENT-200 ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН призначений для очищення зондів для реагентів та зразків біохімічних аналізаторів: ACCENT-200 (II GEN)/BS-200, ACCENT-220S/BS-180 і BS-120 під час рутинної роботи аналізатора. Набір призначений лише для діагностики *in vitro*, для використання медичними працівниками.

ПРИНЦИП ДІЇ

ACCENT-200 ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН являє собою промивний розчин, розміщений на борту аналізатора. Видалення залишків біологічного матеріалу та реагентів, особливо білковмісних матеріалів та мікробних відкладень із зондів для реагентів та зразків, відбувається завдяки очистним властивостям реагенту. ACCENT-200 ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН містить гідроксид натрію та гіпохлорит натрію, які розчиняють та видаляють органічні частинки.

КОНЦЕНТРАЦІЯ АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ В РЕАГЕНТІ

гідроксид натрію	10.3 ммоль/л (mmol/l)
гіпохлорит натрію	<1%
карбонатний буфер	
стабілізатор	

СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТА

Реагент необхідно використати до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. Реагент стабільний на борту аналізатора протягом 30 днів за умови зберігання при температурі 2-10°C (°C).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Захищати від прямого сонячного світла!
- Не використовувати реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.
- Не змішувати реагент, що залишився, з реагентом з нової упаковки.
- Використовувати засоби індивідуального захисту, щоб запобігти контакту зі зразками, реагентами та контролями.
- Уникати скидання в каналізацію або в навколишнє середовище.
- Будь ласка, зверніться до MSDS для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.
- Продукт відповідає критеріям класифікації відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

Інгредієнти:

ACCENT-200 ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН містить гіпохлорит натрію.

Небезпека



H314 Викликає сильні опіки шкіри та пошкодження очей.
H318 Викликає серйозні пошкодження очей.
H412 Шкідливо для водних організмів з довготривалими наслідками.

P280 Одягати захисні рукавички, захисний одяг, засоби захисту очей або обличчя.

P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити водою кілька хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжити промивання.

P310 негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР або до лікаря.

P273 Уникати викиду в навколишнє середовище.

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

ACCENT-200 ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН готовий до використання. Використовувати відповідно до посібника з експлуатації аналізатора.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ¹

Після використання з реагентами слід поводитися як з потенційно інфекційними та утилізувати відповідно до вимог місцевого законодавства.

- Залишки реагентів: 18 01 06*
- Порожні упаковки: 15 01 10*
- Стічні води з аналізатора: 18 01 03*

ІНЦИДЕНТИ²

Про будь-який серйозний інцидент, який стався у зв'язку з пристроєм, слід повідомити виробника (веб-адреса: incidents@cormay.pl) та компетентний орган держави, в якій перебуває користувач та/або пацієнт.

Серйозний інцидент означає будь-який інцидент, який прямо чи опосередковано призвів, міг призвести або може призвести до будь-чого з наступного:

- смерть пацієнта, користувача або іншої особи,
- тимчасове або постійне серйозне погіршення стану здоров'я пацієнта, користувача або іншої особи,
- серйозна загроза здоров'ю населення.

ЛІТЕРАТУРА

- European Commission notice on technical guidance on the classification of waste (2018/C 124/01) of 9 April 2018.
- Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on *in vitro* diagnostic medical devices.

СПИСОК ЗМІН

Попередня версія: 03	Поточна версія: 04
Оновлено розділи: СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТА	



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

PZ KORMEJ S.A.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

