

ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT-300

ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION

Кат. №: 3-112

Дата випуску інструкції: 03-2022



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

| Назва реагента | Варіант | Кат. № |
|------------------------------------|----------------|--------|
| ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT-300 | 6 x 40 мл (ml) | 3-112 |

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT-300 призначений для очищення зондів для реагентів та зразків біохімічних аналізаторів ACCENT-300/BS-300 під час рутинної роботи аналізатора. Набір призначений лише для діагностики *in vitro*, для використання медичними працівниками.

ПРИНЦИП ДІЇ

ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT-300 являє собою промивний розчин, розміщений на борту аналізатора. Видалення залишків біологічного матеріалу та реагентів, особливо білковмісних матеріалів та мікробних відкладень із зондів для реагентів та зразків, відбувається завдяки очистним властивостям реагенту. ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT-300 містить гідроксид натрію та гіпохлорит натрію, які розчиняють та видаляють органічні частинки.

КОНЦЕНТРАЦІЯ АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ В РЕАГЕНТІ

| | |
|-------------------|-----------------------|
| гідроксид натрію | 10.3 ммоль/л (mmol/l) |
| гіпохлорит натрію | <1% |
| карбонатний буфер | |
| стабілізатор | |

СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТА

Реагент необхідно використати до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Захищати від прямого сонячного світла!
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.
- Не змішуйте реагент, що залишився, з реагентом з нової упаковки.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту, щоб запобігти контакту зі зразками, реагентами та контролями.
- Уникайте скидання в каналізацію або в навколишнє середовище.
- Будь ласка, зверніться до MSDS для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.
- Продукт відповідає критеріям класифікації відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

Інгредієнти:

ACCENT-200 ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН містить гіпохлорит натрію.

Небезпека



H314 Викликає сильні опіки шкіри та подразнення очей.
H318 Спричиняє серйозні подразнення очей.
H412 Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками.

P280 Одягайте захисні рукавички, захисний одяг, засоби захисту очей або обличчя.

P301+P330+P331 ПРИ КОВТАННІ: Прополоскати рот. НЕ викликати блювоту.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою.

P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛАННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжуйте полоскання.

P310 Негайно зателефонуйте в токсикологічний центр або до лікаря.

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT-300 готовий до використання. Використовуйте відповідно до посібника з експлуатації аналізатора.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ¹

Після використання з реагентами слід поводитися як з потенційно інфекційними та утилізувати відповідно до вимог місцевого законодавства.

- Залишки реагентів: 18 01 06*
- Порожні пакунки: 15 01 10*
- Стічні води з аналізатора: 18 01 03*

ІНЦИДЕНТИ²

Про будь-який серйозний інцидент, який стався у зв'язку з пристроєм, слід повідомити виробника (веб-адреса: incidents@cormay.pl) та компетентний орган держави-члена, в якій перебуває користувач та/або пацієнт.

Серйозний інцидент означає будь-який інцидент, який прямо чи опосередковано призвів, міг призвести або може призвести до будь-чого з наступного:

- смерть пацієнта, користувача або іншої особи,
- тимчасове або постійне серйозне погіршення стану здоров'я пацієнта, користувача або іншої особи,
- серйозна загроза здоров'ю населення.

ЛІТЕРАТУРА

- European Commission notice on technical guidance on the classification of waste (2018/C 124/01) of 9 April 2018.
- Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on *in vitro* diagnostic medical devices.

СПИСОК ЗМІН

| | |
|--|--------------------|
| Попередня версія: 02 | Поточна версія: 03 |
| Оновлено розділи: ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ, ПРИНЦИП ДІЇ, КОНЦЕНТРАЦІЯ АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ В РЕАГЕНТІ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ, УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ | |
| Додано розділи: СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТА, ІНЦИДЕНТИ, ЛІТЕРАТУРА | |



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

