

ЖОВЧНІ КИСЛОТИ КАЛІБРАТОР

CORMAY BILE ACIDS CALIBRATOR

Кат. №: 3-125

Дата випуску інструкції: 12-2023



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору
CORMAY BILE ACIDS CALIBRATOR

Склад набору
1 x 2 мл (ml) Кат. №
3-125

ПРИЗНАЧЕННЯ

Калібратор для визначення концентрації жовчної кислоти. Калібратор повинен використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

ВСТУП

Жовчні кислоти є основним продуктом розпаду ендogenous холестерину, що утворюється в печінці. Загальна кількість жовчних кислот метаболізується в печінці і є цінним показником нормальної роботи або порушення роботи печінки. Загальна кількість жовчних кислот у сироватці крові збільшується у пацієнтів з вірусним гепатитом, цирозом печінки та раком печінки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАЛІБРАТОР ЖОВЧНИХ КИСЛОТ CORMAY - це однорівневий рідкий стабільний калібратор, приготовлений у буферній основі.

ПРИСВОЄНІ ЗНАЧЕННЯ

Присвоєні значення жовчних кислот, різні для кожної партії, вказані на етикетці кожного флакону.

СКЛАД НАБОРУ

BILE ACIDS CALIBRATOR 1 x 2 мл (ml)

ПІДГОТОВКА І ЗБЕРІГАННЯ

Калібратор готовий до використання.
Нерозкритий калібратор, що зберігається при 2-8 °C (°C), стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці продукту. Після відкриття калібратор стабільний протягом 30 днів при зберіганні при 2-8 °C (°C).
Зберігайте калібратор з щільно закритим ковпачком, коли він не використовується.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Захищати від прямих сонячних променів та забруднень.
- Можливі інфекційні агенти в матеріалах були інактивовані. Оскільки жоден метод не може забезпечити повну впевненість у відсутності інфекційних агентів, з цим матеріалом слід поводитись так, ніби він здатний передавати інфекційне захворювання та утилізувати як біологічно небезпечні відходи або медичні відходи відповідно до чинного місцевого та національного законодавства.

ВІДСТЕЖУВАНІСТЬ

Значення калібратора призначається з посиланням на Внутрішній стандарт.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

