



## Набор для определения ТИРЕОГЛОБУЛИНА

Thyroglobulin

**Кат. №** : 101-3377  
**Количество** : 96  
**Производитель** : DAI, (USA)

**Внимание:** основой при проведении анализа есть оригинал инструкции на английском языке.

Методика проверена 03/05

### НАЗВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данный анализ является непрямым твердо фазовым иммуноферментным анализом для количественного измерения тиреоглобулина в человеческой сыворотке. Анализ предназначен для диагностики *in vitro* в целях диагностики различных тиреоидных заболеваний как тиреоидит и гипертиреозидизм.

### КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Тиреоглобулин – многократно гликозилированный, растворимый в воде иодопротейн. Молекулярный вес около 660 000 Дальтон делится на две идентичные субъединицы. Тиреоглобулин синтезируется в тиреоцитах щитовидной железы и секретирован в полость тиреоидных фолликул. Иодирование тирозильных остатков белков приводит к предшественникам тиреоидных гормонов Т3 и Т4. Наконец свободные Т3 и Т4 освобождаются в циркуляцию вместе с малыми количествами тиреоглобулина. Подобно Т3 и Т4 синтез и секреция тиреоглобулина контролируется ТТГ и ТРГ. Подавляющая терапия с использованием тиреоидных гормонов также приводит к пониженным концентрациям тиреоглобулина в сыворотке.

Повышенные концентрации тиреоглобулина в сыворотке обнаруживаются при различных тиреоидных заболеваниях, таких как

- гипертиреоз
- нетоксический зоб
- тиреоидиты
- тиреоидная карцинома.

Определение тиреоглобулина – специальный прогностический инструмент у пациентов, леченных по поводу болезни Грейвса. Высокие уровни тиреоглобулина в конце тиростатической терапии свидетельствуют о раннем рецидиве болезни, в то время как постоянно низкие уровни тиреоглобулина прогнозируют тенденцию к выздоровлению.

Основное применение для определения тиреоглобулина – постхирургический мониторинг пациентов с тиреоидной карциномой. После тиреоид-эктомии, комбинированной с лучевой терапией для разрушения оставшихся тиреоидных тканей можно ожидать промежуточный пик вслед за быстрым уменьшением концентрации циркулирующего тиреоглобулина ниже предела детектирования тиреоглобулина. Каждое новое повышение

тиреоглобулина в сыворотке свидетельствует о остаточных тиреоидных тканях, локальном рецидиве метастаз.

Благодаря легкости проведения мониторинга пациентов с тиреоидной карциномой определение тиреоглобулина – важная неинвазивная альтернатива и дополнение скинтиграфии с <sup>131</sup>I.

### ПРИНЦИП ТЕСТА

Высоко очищенная анти-человеческие-тиреоглобулин антитела привиты к микрочайкам. Тиреоглобулин, если присутствуют в разбавленной сыворотке, связываются с микрочайками. Промывание микрочайек удаляет несвязанные антитела сыворотки. Анти-человеческие тиреоглобулин конъюгированные пероксидазой хрена иммунологически связываются с связанным тиреоглобулином пациента, формируя антитело-конъюгат--тиреоглобулин комплекс. Промывание микрочайек удаляет несвязанный конъюгат. Энзимный субстрат при присутствии связанного конъюгата гидролизуется до формирования голубого окраса. Добавления кислоты останавливает реакцию, формируя желтый конечный продукт. Интенсивность этого желтого цвета прямо пропорциональна концентрации тиреоглобулина, присутствующих в образце.

### ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Все реагенты набора предназначены строго для диагностики *in vitro*.
- Не смешивайте компоненты наборов из различных лотов.
- Компоненты набора содержат материалы человеческого происхождения, которые протестированы методами, одобренными FDA, на отсутствие антител к гепатиту В и ВИЧ. Однако, ни один метод не может гарантировать, что продукты человеческого происхождения не инфицированы. Следовательно, с реагентами и образцами сыворотки следует обращаться как с потенциально инфекционно опасными.
- Избегайте контакта с ТМБ (3,3',5,5'-тетраметилбензидином). Если ТМБ попал на кожу, тщательно вымойте водой с мылом.
- Стоп раствор содержит соляную кислоту. Если раствор попал на кожу, тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.
- Некоторые компоненты набора (напр. Контроли, буфер образцов и буферный моющий раствор) содержат азид натрия в качестве консерванта. Азид натрия является высоко токсичным и реактивным в чистой форме. При концентрации в продукте тем не менее не опасен. Вопреки классификации как не-опасный, мы настоятельно рекомендуем использовать обычные правила безопасности.
- Некоторые наборы содержат Проклин 300 в качестве консерванта. При уничтожении реагентов, содержащих проклин 300, промойте большим количеством воды для разбавления компонентов до ниже активного уровня.
- Используйте перчатки при работе с образцами и реагентами и тщательно мойте руки после работы.
- Не пипетируйте ртом.
- Не ешьте, не пейте, не курите или не применяйте косметику в местах работы с образцами или реагентами набора.
- Не допускайте контакта между буферным раствором перекиси и легко окисляемыми

материалами: повышенная температура может вызывать спонтанное возгорание.

### ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Разделяемый микропланшет, состоящий из 12 стрипов по 8 ячеек каждый, покрытых высокоспецифичными антителами к тиреоглобулину (поликлональными, кролячими) – **1 планшет**.
2. Калибраторы тиреоглобулина в PBS/BSA буфере, содержащие 0; 3; 10; 30; 100 и 300 нг/мл – **6 флаконов, 1,5 мл каждый**.
3. Контроли тиреоглобулина в PBS/BSA буфере (нормальный и повышенный), см. вкладыш со значениями – **2 флакона, 1,5 мл каждый**.
4. Контроль тиреоглобулина на извлечение, содержит 50 нг/мл человеческого тиреоглобулина – **1 флакон, 3 мл**.
5. Буфер образцов, желтый, **готов к использованию - 1 флакон, 15 мл**.
6. Раствор ферментного конъюгата (бледно красный), содержащий поликлональные кроличьи анти-человечьи антитела к тиреоглобулину, меченые пероксидазой хрена - **1 флакон, 15 мл**.
7. Раствор субстрата ТМБ - **1 флакон, 15 мл**.
8. Стоп раствор (1M HCl) – **1 флакон, 15 мл**.
9. Буферный промывочный раствор, **концентрат (50x) - 1 флакон, 20 мл**.

### ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

- a. Храните набор при 2-8°C.
- b. Содержит ячейки микропланшета запечатанные в сухом пакете с осушителем.
- c. Реагенты стабильны до окончания срока пригодности.
- d. Не поддавайте реагенты влиянию жары, солнца или сильного света во время хранения или использования.
- e. Разбавленные буфер образцов и моющий буфер стабилен 30 дней при хранении при 2-8°C

### ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Микропланшетный ридер с длиной волны измерения 450 нм;
2. Многоканальный диспенсер или пипетка для дозирования на 100 мкл;
3. Вортекс;
4. Пипетки на 10, 100 и 1000 мкл;
5. Лабораторное часовое устройство;
6. Программное обеспечение
7. Дистиллированная вода;
8. Мерные цилиндры на 100 и 1000 мл
9. Пластиковый контейнер для хранения промывочного р-ра;

### СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

- a. Соберите образцы цельной крови, используя приемлемую медицинскую технологию, избегая гемолиза.
- b. Дайте возможность крови сгуститься и отделите сыворотку центрифугированием.
- c. Сыворотка должна быть чистой и негемолизованной. Необходимо избегать гемолитической или липемической сыворотки.
- d. Образцы должны храниться при 2-8°C до 5 дней или при -20°C до шести месяцев.

- e. Избегайте повторного замораживания и размораживания образцов. Это может привести к потере активности аутоантителами.
- f. Не рекомендуется тестирование инактивированной жарой сыворотки.

### ПРОЦЕДУРНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Не используйте компоненты набора после окончания срока пригодности.
2. Не меняйте компоненты набора между разными лотами.
3. Все материалы следует привести к комнатной температуре.
4. Все реагенты при начале анализа должны быть готовы к работе. После начала анализ необходимо проводить непрерывно для получения надежных и точных результатов.
5. Проводите все шаги анализа в указанном порядке.
6. Всегда используйте свежую разбавленную сыворотку.
7. Пипетируйте все реагенты и образцы на дно ячеек.
8. Для предотвращения загрязнения меняйте наконечники между образцами и разными контролями набора.
9. Очень важно промывать ячейки тщательно и удалять полностью всю жидкость для получения оптимальных результатов.
10. Все шаги инкубации должны проводиться определенное время.
11. Контрольная сыворотка должна анализироваться как неизвестная для проверки реагентов и анализа.
12. Не используйте повторно ячейки микропланшета.

Для всех контролей, на этикетках флаконов указаны соответствующие концентрации. Используя эти концентрации может быть вычислена калибровочная кривая для полуколичественного считывания результатов пациента.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

#### Приготовление промывочного раствора

Разбавьте содержимое флакона с 50-кратным концентратом промывочного буфера дистиллированной водой до конечного объема 1000 мл перед использованием. Храните охлажденным до 2-8°C по крайней мере 30 дней после приготовления или до срока годности, указанного на этикетке.

### МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

#### ТЕСТ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Присутствие антител к тиреоглобулину может мешать определению тиреоглобулина в сыворотке.

На поверхности молекулы тиреоглобулина есть шесть иммуногенных эпитопа, с которыми могут связываться антитела с различными характеристиками связывания. Аутоантитела к этим эпитопам будут вызывать ложно отрицательные результаты, связывая эндогенный тиреоглобулин. Следовательно, необходимо доказать присутствие аутоантител в образцах пациентов. Это может быть сделано либо прямым количественным измерением анти-тиреоглобулина или непрямым способом, в экспериментах на извлечение в сочетании с количественным определением тиреоглобулина. Для этих экспериментов к пробе пациента добавляется экзогенный тиреоглобулин с определенной концентрацией. Извлечение экзогенного тиреоглобулина может быть рассчитана и обеспечит доказательство наличия аутоантител. Измерение дает

корреляцию величин извлечения с концентрацией присутствующих антител.

Для теста на извлечение образцы следует измерять дважды – для прямого измерения и для пробы с добавленным тиреоглобулином. Процент извлечения рассчитывается по формуле, приведенной ниже:

$$\% \text{ извл.} = \frac{\text{нг/мл тиреоглоб. (с контр. на извлеч.)}}{\frac{\text{нг/мл тиреоглоб. (без контр. на извлеч.)} + 50}{\text{нг/мл}}} \times 100$$

**Замечание:** контроль на извлечение содержит 50 нг/мл тиреоглобулина человека.

Ожидается диапазон извлечения 80-120%. Если процент тиреоглобулина выше или ниже этих значений, значение тиреоглобулина для соответствующего пациента для дальнейшей оценки должны быть исключены.

## Процедура

1. Приготовьте достаточное количество стрипов для постановки калибраторов, контролей, неразбавленных проб пациентов (P) и пробы для тестов на извлечение (R) в дублях.

	1	2	3	4	5	6
a	SA	SE	P1	P3		
b	SA	SE	P1	P3		
c	SB	SF	R1	R3		
d	SB	SF	R1	R3		
e	SC	C1	P2	...		
f	SC	C1	P2	...		
g	SD	C2	R2	...		
h	SD	C2	R2	...		

SA-SF – стандарты A-F

P1, P2 – пробы пациентов 1, 2

R1, R2 – добавленные образцы пациентов 1, 2

C1 – положительный контроль

C2 – отрицательный контроль

2. Добавьте в ячейки **50 мкл** калибраторов, контролей и образцов пациентов.
3. Добавьте **50 мкл** буфера для образцов к калибраторам, контролям и пробам пациентов (P1, P2 ...). Добавьте **50 мкл** контроля тиреоглобулина на извлечение к пробам пациентов (R1, R2 ...).
4. Инкубируйте 60 минут при комн. температуре (20 - 28 °C).
5. Удалите содержимое ячеек и трижды промойте **300 мкл** промывочного раствора.
6. Добавьте **100 мкл** раствора ферментного конъюгата в каждую ячейку.
7. Инкубируйте 60 минут при комнатной температуре.
8. Удалите содержимое ячеек и трижды промойте **300 мкл** промывочного раствора.
9. Добавьте **100 мкл** субстрата ТМБ в каждую ячейку.
10. Инкубируйте 15 минут при комнатной температуре.
11. Добавьте **100 мкл** стоп раствора в каждую ячейку и выдержите 5 минут.
12. Считайте оптическую плотность при 450 нм и рассчитайте результаты. Рекомендуется бихроматическое считывание с фильтром сравнения 600-690 нм. **Развившаяся окраска стабильна в течение 30 минут. Считайте оптическую плотность за это время.**

## Автоматика

Данный набор пригоден для использования с автоматическим ELISA процессором. Тестовая процедура, описанная выше, пригодна для использования с или без автоматике.

## ИНТЕРПРИТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

### Контроль качества

Данный тест пригоден, если ОП при 450 нм для повышенного (1) и нормального контроля (2) и калибраторов A-F соответствует диапазонам, указанным в сертификате контроля качества, что поставляется вместе с набором. Если критерии не соответствуют, результаты не пригодны, и тест необходимо повторить.

### Вычисление результатов

Для данного набора рекомендуется 4-параметрическая регрессия с линейно-логарифмическими координатами для оптической плотности и концентрации. Также возможно использование аппроксимации Smoothed Spline.

### Для ручного расчета рекомендуется линейно-логарифмическая миллиметровка.

Сначала рассчитайте средние оптические плотности для каждого калибратора. Используйте линейно-логарифмическую миллиметровку и отложите среднюю оптическую плотность против концентрации для каждого калибратора. Проведите оптимальную калибровочную кривую, используя все точки. Концентрация неизвестных образцов вычисляется интерполяцией.

### Пример вычисления

Пример вычисления результатов смот. в таблице.

Калибраторы									
№	Лунка	ОП1	ОП2	Средне е	Конц. 1	Конц. 2	Сред н	жид. конц.	CV %
STA	A1/B1	0.065	0.062	0.063	0.4	0.2	0.3	0	4
STB	C1/D1	0.117	0.111	0.114	2.8	2.5	2.6	3	4
STC	E1/F1	0.221	0.209	0.215	10	9	10	10	4
STD	G1/H1	0.421	0.451	0.436	29	32	31	30	5
STE	A2/B2	0.930	0.933	0.932	102	102	102	100	0
STF	C2/D2	1.759	1.780	1.769	298	304	301	300	1

В этой табл. показаны типичные данные, которые даны только для иллюстрации и не могут быть использованы для вычисления результатов пациентов.

### Интерпретация результатов

В литературе сообщается о значениях cut-off для тиреоглобулина в сыворотке около 60 нг/мл с медианой от 5 до 10 нг/мл. У новорожденных и у беременных 3-его триместра могут наблюдаться высокие значения тиреоглобулина. Для правильной интерпретации концентрации тиреоглобулина необходима информация о поступлении йода в организм. В регионах с эндемическим зобом уровни тиреоглобулина выше.

Настоящий набор дает значения тиреоглобулина у здоровых доноров от 2 до 50 нг/мл.

У пациентов с общей тиреодектомией после лучевой терапии тиреоглобулин не должен обнаруживаться. Любое повышение тиреоглобулина до детектируемых значений свидетельствует о рецидиве и метастазах.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА****Параллелизм**

В экспериментах по разбавлению проб сыворотки с высокими концентрациями тиреоглобулина были разбавлены буфером для образцов и проанализированы. Анализ показывает линейность на всем диапазоне измерения.

**Точность**

Статистика была посчитана для трех образцов по результатам 24 определений в одном круге анализов для точности внутри серии. Для определения точности между сериями были рассчитаны результаты 5 различных серий анализов с 6 определениями каждого:

<b>Внутри серии</b>		
Образец No	Знач. X [нг/мл]	CV [%]
1	33	1,9
2	93	2,4
3	227	3,2

<b>Между сериями</b>		
Образец No	Знач. X [нг/мл]	CV [%]
1	31	1,7
2	88	1,7
3	212	1,1

**Чувствительность**

Минимально детектируемый предел для тиреоглобулина – 1,0 нг/мл.

**Специфичность**

Антисыворотка (поликлональная, кроличья), использованная для покрытия микропланшета и в ферментном конъюгате, высокоспецифичная к молекуле человеческого тиреоглобулина.

**Клибровка**

Тест-система прокалибрована по Certified Reference Material CRM 457 из BCR, Брюссель для человеческого тиреоглобулина.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ**

Данный набор не является сам по себе диагностическим, но он используется в диагностических целях. . Определение клинического диагноза не должно основываться на результатах одного теста и должно учитывать все данные клинических и лабораторных исследований.

**ВЛИЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА**

Не влияет гемолизированная (до 1000 мг/дл), липемическая (до 3 г/дл триглицеридов) сыворотка или сыворотка, содержащая билирубин (до 40 мг/дл). Не было обнаружено влияние при использовании антикоагулянтов. Но рекомендуется не использовать сильно гемолизированную или липемическую сыворотку.

**Информация для заказа:**

**ЧМП «ДИАМЕБ»**  
ул. Черновола, 97,  
г. Ивано-Франковск, 76005  
тел.: (0342) 77 51 22;  
тел./факс: (0342) 77 56 12  
E-mail: [info@diameb.com](mailto:info@diameb.com)

