

МІОГЛОБІН КАЛІБРАТОРИ

CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS

Кат. №: 4-279

Дата випуску інструкції: 09-2011



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору

CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS

Склад набору

4 x 1 мл (ml)

Кат. №

4-279

ВСТУП

Міоглобін (Mb) є гемо-білком, який присутній в клітинах серцевого і скелетного м'язів і вивільняється в циркуляцію крові, коли ці клітини пошкоджені. Визначення сироваткового рівня міоглобіну корисно в діагностиці інфаркту міокарда, м'язової дистрофії, міопатії і міозиту, а також для оцінки лікування і прогнозу захворювання.

Набір калібраторів міоглобіну CORMAY готується шляхом розведення очищеного людського міоглобіну з буферним розчином, що містить 1 w/v % бичачого сироваткового альбуміну в різних концентраціях. Концентрації вказані на кожному флаконі і в цьому вкладиші до набору.

Набір калібраторів міоглобіну CORMAY призначений для калібрування визначення міоглобіну на автоматичних аналізаторах.

УПАКОВКА

Колір ковпачка	Концентрація міоглобіну	Об'єм
БІЛИЙ	100 нг/мл (ng/ml)	1 x 1 мл (ml)
СИНИЙ	200 нг/мл (ng/ml)	1 x 1 мл (ml)
ЗЕЛЕНИЙ	400 нг/мл (ng/ml)	1 x 1 мл (ml)
ЧЕРВОНИЙ	800 нг/мл (ng/ml)	1 x 1 мл (ml)

Калібратори готові до використання.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

Нерозкритий калібратор стабільний при температурі 2-10 °C (°C) до закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі. Захищати від світла.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Продукт призначений тільки для діагностики *in vitro*.
- Так як колір ковпачків змінюється залежно від концентрації міоглобіну у флаконах, будьте уважні не переплутати ковпачки.
- Не змішувати калібратори з калібраторами з інших флаконів.
- Використовувати калібратори відповідно до даної інструкції.
- Калібратори засновані на людській сироватці, яка була протестована на наявність антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) і гепатиту С (HCV) і антитіл до ВІЛ, і виявилися неактивними. Тим не менш, з ними необхідно поводитись як з потенційно біологічно небезпечним матеріалом з дотриманням усіх необхідних заходів обережності.
- Калібратори містять азид натрію (< 0.1%) в якості консерванту. Уникайте контакту зі шкірою та слизовими оболонками.

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Калібратори міоглобіну готуються відповідно до стандарту підприємства.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

