

# ХОЛЕСТЕРИН СТАНДАРТ 200

## CHOLESTEROL STANDARD 200

Кат. №: 5-118

Дата випуску інструкції: 07-2021



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

**Назва набору**  
**CHOLESTEROL STANDARD 200**

**Склад набору**  
1 x 5 мл (мл)

**Кат. №**  
5-118

### ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

CHOLESTEROL STANDARD 200 призначений для калібрування визначення холестерину в сироватці та плазмі за допомогою ручного аналізу. Стандарти повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

### ВСТУП

Холестерин є важливим структурним компонентом клітинних мембран і прекурсором жовчних кислот і всіх стероїдних гормонів. Тому холестерин має величезне значення для нормального функціонування організму. Але існує також добре встановлений зв'язок між концентрацією холестерину в крові та ішемічною хворобою серця. Вимірювання рівня холестерину в сироватці крові є цінним для профілактики та моніторингу серцево-судинних захворювань. Це визначення корисне також для оцінки всмоктання в кишечнику, функції печінки та жовчного міхура.

### СКЛАД

СТАНДАРТ ХОЛЕСТЕРИНУ 200 - однорівневий рідкий стандарт, приготовлений на буферній основі.  
Точна концентрація стандарту надрукована на етикетці кожного флакона.

### СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Стандарти готові до використання.  
Стандарти стабільні при зберіганні при 2-8 °C (°C) до дати закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Зберігайте стандарти щільно закритими, коли вони не використовуються.
- Будь ласка, зверніться до MSDS для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.
- СТАНДАРТ ХОЛЕСТЕРИНУ 200 відповідає критеріям класифікації відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

Інгредієнти:

Стандарти містять  $\alpha$ -додецил- $\omega$ -гідрокси-полі(окси-1,2-етандиіл).

### Небезпека



H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей.

H315 Викликає подразнення шкіри.

P280 Одягайте захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя.

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАННІ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є та це легко зробити. Продовжуйте полоскання.

P310 - Негайно зателефонуйте в токсикологічний центр або до лікаря.

P302 + P352 ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води та мила.

### ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

СТАНДАРТ ХОЛЕСТЕРИНУ 200 простежується за стандартним матеріалом SRM 1951C.

### УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



### ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.  
Wiosenna 22,  
05-092 Lomianki, Poland  
phone: +48 (0) 81 749 44 00  
fax: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.  
вул. Віосенна, 22  
05-092, м. Ломянки, Польща  
тел.: +48 (0) 81 749 44 00  
факс: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»  
вул. Симона Петлюри, буд. 25  
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна  
тел.: +380 (342) 77 51 22  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

