

ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100

GLUCOSE STANDARD 100

Кат. №: 5-121

Дата випуску інструкції: 07-2021



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору
ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100

Формат набору
1 x 5 мл (ml)

Кат. №:
5-121

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100 призначений для калібрування визначення глюкози в сироватці крові або плазмі та спинномозковій рідині за допомогою ручного аналізу.

Стандарти повинні використовуватися лише для діагностики *in vitro*, кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, за відповідних лабораторних умов.

ВСТУП

Глюкоза - це простий шестивуглецевий цукор. Окислювальний метаболізм глюкози забезпечує енергію для більшості клітинних процесів. Рівень глюкози в крові жорстко контролюється кількома гормонами. Підвищений рівень глюкози є класичною ознакою цукрового діабету. Аномалії рівня глюкози (гіпер- або гіпоглікемія) можуть бути спричинені також пухлинами підшлункової залози та захворюваннями печінки, щитовидної залози або надниркових залоз.

СКЛАД

ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100 є однорівневим рідинним стандартом, приготованими на буферній основі.

Точна концентрація стандарту надрукована на етикетці кожного флакона.

ПІДГОТОВКА ТА ЗБЕРІГАННЯ

Стандарти готові до використання.

Стандарти при зберіганні при температурі 2-25 °C (°C) стабільні до закінчення терміну придатності, надрукованого на флаконі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Зберігайте стандарти щільно закритими, коли вони не використовуються.
- Для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання виробу зверніться до інформаційного паспорта безпеки.

ВІДСТЕЖЕННЯ

ГЛЮКОЗА СТАНДАРТ 100 простежується до референсного матеріалу SRM 965B.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, зверніться до місцевих законодавчих вимог.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

