

# ВАЛЬПРОЕВА КИСЛОТА КОНТРОЛЬ

## CORMAY VALPROIC ACID CONTROLS

Кат. №: 5-152

Дата випуску інструкції: 11-2016



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### Назва набору

CORMAY VALPROIC ACID CONTROLS

### Склад набору

2 x 5 мл

### Кат. №

5-152

Набір CORMAY КОНТРОЛІ ВАЛЬПРОЕВОЇ КИСЛОТИ призначений для контролю якості визначення вальпроєвої кислоти. Калібратори готуються на базі сироватки людини. Точні концентрації калібраторів надруковані на етикетці.

### ПАКУВАННЯ

КОНТРОЛЬ 1  
КОНТРОЛЬ 2

### Розмір

1 x 5 мл

1 x 5 мл

### ПРОЦЕДУРА

- Відкрийте флакон обережно і додайте рівно 5 мл деіонізованої води при 20-25 °С.
- Закрийте пляшку та залиште на 30 хвилин до використання.
- Злегка перемішайте кілька разів протягом періоду відновлення, щоб переконатись, що вміст повністю розчинено.
- Перед використанням змішайте вміст, кілька разів обертаючи флакон. Не трясіть! Уникайте формування піни! Зберігайте будь-який невикористований матеріал у холодильнику.

### СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Ліофілізована сироватка залишається стабільною при зберіганні при 2-8 °С до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці продукту.
- Компоненти в розведеній контрольній сироватці стабільні протягом 4 тижнів при зберіганні при 2-8 °С та зберігаються в оригінальному контейнері, не забруднені.
- Ретельно перемішати контролі до використання.
- Захищайте від світла та уникайте забруднення!

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Продукт призначений тільки для діагностичного використання in vitro.
- Контролі повинні використовуватися тільки за призначенням, відповідним кваліфікованим персоналом лабораторії, у відповідних лабораторних умовах.
- Контролі виготовлені на основі сироватки крові людини, яка була випробувана на HBsAg та антитіла до ВІЛ та ВГС, і виявилась неактивною. Тим не менш, матеріали містять речовини людського походження і повинні бути оброблені з належною обережністю.

### ПРИЗНАЧЕНІ ЗНАЧЕННЯ

КОНТРОЛЬ	ПАРТІЯ	СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ	ДІАПАЗОН
КОНТРОЛЬ 1	611-10	545 мкмоль/л 78,6 мкг/мл	436 - 654 мкмоль/л 62,9 - 94,3 мкг/мл
КОНТРОЛЬ 2	611-09	918 мкмоль/л 132 мкг/мл	734 - 1102 мкмоль/л 106 - 158 мкг/мл

### УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



### ВИРОБНИК

ПЗ КОРМЕЙ С.А.  
вул. Віосенна, 22  
05-092 м. Ломянкі, Польща  
тел.: +48 (0) 81 749 44 00  
факс: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»  
вул. Чорновола, 97  
м. Івано-Франківськ, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

