

ТУБЕРКУЛЬОЗ IgG, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



ВИРОБНИК

Genrui Biotech Inc.
4-10F, Building 3
Geya Technology Park,
Guangming District, 518106
Shenzhen, China
Phone: + 86-755-26835560
Fax: + 86-755-26678789
e-mail: info@genrui-bio.com
Web: www.genrui-bio.com

ГЕНРУЙ БІОТЕК Інк.
4-10Ф, Будівля 3
Технологічний Парк Гея
Район Гуанмін, 518106
Шеньчжень, Китай
Тел.: + 86-755-26835560
Факс: + 86-755-26678789
e-пошта: info@genrui-bio.com
Веб: www.genrui-bio.com

Tuberculosis IgG (TB-IgG) Quality Control

Кат. №: **52105124**

Дата випуску інструкції: **12-12-2022**

Версія: **A/0**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Лот: Дивіться етикетку

Термін придатності: Дивіться етикетку

Назва продукту

Загальна назва: Туберкульоз IgG (ТБ-IgG), Контроль якості

Торгова назва: TB-IgG QC

Специфікація упаковки

2 x 0.5 мл (mL)/пляшку

Кат. №: 52105124

Призначення

Цей продукт використовується для контролю якості ТБ-IgG на кількісному імунофлуоресцентному аналізаторі.

Основні компоненти

Рекомбінантний білок ТБ-IgG.

Зберігання та стабільність

НЕ ВІДКРИТИЙ: КЯ є стабільним протягом 18 місяців (див. етикетку щодо конкретної дати) при зберіганні при температурі від -25 °C (°C) до 8 °C (°C).

ВІДКРИТИЙ: відновлений КЯ стабільний протягом 6 днів при температурі -20 °C (°C) або 1 день при температурі 2-8 °C (°C) в темряві.

Примітка: Уникайте повторного заморожування/розморожування відновленого КЯ.

Метод тестування

1. Перед використанням доведіть контроль якості до кімнатної температури (18-30 °C (°C)).
2. Обережно відкрийте кришку пляшки, щоб уникнути розбризкування вмісту.
3. Додайте 0.5 мл (mL) очищеної води.
4. Закрийте пляшку кришкою та залиште при кімнатній температурі на 15 хвилин, обережно струсіть пляшку, щоб повністю розчинити сухий порошок.
5. Після повного розчинення сухого порошку використовуйте його як зразок.

Застереження

1. Використовується тільки для діагностики *in vitro*, зверніться до Посібника з експлуатації.
2. Не використовуйте реагенти, в яких закінчився термін придатності.
3. Не використовуйте реагенти різних партій разом.

Значення

КЯ тестується, результат має бути позитивним.



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +38 (0342) 775 122
e-пошта: info@diameb.ua
www.diameb.ua

