

НАБІР FLUSH

FLUSH SET

Кат. №: 8-896

Дата випуску інструкції: 10-2022



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

| Назва реагенту | Пакування | Кат. № |
|----------------|-----------------|--------|
| РОЗЧИН FLUSH | 1 л (l) | 8-832 |
| РОЗЧИН FLUSH | 500 мл (ml) | 8-891 |
| НАБІР FLUSH | 12 x 17 мл (ml) | 8-896 |

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

РОЗЧИН FLUSH/НАБІР FLUSH призначений для періодичної та екстреної очистки вимірювальної системи гематологічних аналізаторів.

Призначений тільки для діагностики *in vitro*, для використання медичним персоналом.

ПРИНЦИП ДІЇ

РОЗЧИН FLUSH/НАБІР FLUSH - концентрований розчин гіпохлориту, призначений для інтенсивного окислювального очищення, полоскання і промивання вимірювальної системи гематологічних аналізаторів. РОЗЧИН FLUSH/НАБІР FLUSH використовується для видалення відкладень, що утворюються від аналізу зразків.

КОНЦЕНТРАЦІЯ АКТИВНИХ ІНГРЕДІЕНТІВ В РЕАГЕНТІ

| | |
|------------------|-------|
| активний хлор | 3.5 % |
| натрію гідроксид | 0.2 % |
| стабілізатор | 0.5 % |
| натрію хлорид | |

СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТУ

Реагент необхідно використати до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. Після відкриття реагент стабільний протягом 9 тижнів при кімнатній температурі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Захищати від прямого сонячного світла!
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.
- Не змішуйте реагент, що залишився, з реагентом з нової упаковки.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту, щоб запобігти контакту зі зразками, реагентами та контролями.
- Уникайте скидання в каналізацію або в навколишнє середовище.
- Будь ласка, зверніться до Паспорту безпеки матеріалу для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.
- ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН/НАБІР ПРОМИВНОГО РОЗЧИНУ відповідає критеріям класифікації відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

Інгредієнти:

РОЗЧИН FLUSH/НАБІР FLUSH містить натрію гідроксид.

Небезпека



H314 Викликає сильні опіки шкіри та пошкодження очей.

H318 Викликає серйозне пошкодження очей.

H400 Дуже токсичний для водних організмів.

H411 Шкідливий для водних організмів з тривалими ефектами.

H290 Може викликати корозію металів.

P280 Одягати захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя.



P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжуйте полоскання.

P310 негайно зателефонуйте в токсикологічний центр або до лікаря.

P273 Уникайте потрапляння у навколишнє середовище.

P391 Зібрати витік.

P234 Зберігати тільки в оригінальній упаковці.

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

Через відмінності в процедурах очищення залежно від моделі аналізатора дотримуйтеся інструкцій у посібнику користувача приладу та/або рекомендацій щодо обслуговування.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ¹

Після використання з реагентами слід поводитися як з потенційно інфекційними та утилізувати відповідно до вимог місцевого законодавства.

- Залишки реагентів: 18 01 06*
- Порожні пакунки: 15 01 10*
- Стічні води з аналізатора: 18 01 03*

ІНЦИДЕНТИ²

Про будь-який серйозний інцидент, який стався у зв'язку з пристроєм, слід повідомити виробника (веб-адреса: incidents@cormay.pl) та компетентний орган держави-члена, в якій перебуває користувач та/або пацієнт.

Серйозний інцидент означає будь-який інцидент, який прямо чи опосередковано призвів, міг призвести або може призвести до будь-чого з наступного:

- смерть пацієнта, користувача або іншої особи,
- тимчасове або постійне серйозне погіршення стану здоров'я пацієнта, користувача або іншої особи,
- серйозна загроза здоров'ю населення.

ЛІТЕРАТУРА

- European Commission notice on technical guidance on the classification of waste (2018/C 124/01) of 9 April 2018.
- Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on *in vitro* diagnostic medical devices.

СПИСОК ЗМІН

| | |
|--|--------------------|
| Попередня версія: 06 | Поточна версія: 07 |
| Оновлено розділи: ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ | |



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

