

# КАЛІБРАТОР ЦИСТАТИНУ С ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

## Cystatin C Calibrator High

Каталог. №: **909890**

Дата випуску інструкції: **2012/11**  
Версія **02**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

**Рідкий калібратор людського походження для використання у калібруванні турбідиметричних аналізів для визначення цистатину С**

**Кат. №:** 909890  
**Вміст:** 1 x 2 мл  
Калібратор Цистатину С  
високий

### СКЛАД

Dialab Калібратор Цистатину С високий приготовлений на основі людської сироватки.

Азид натрію 0.095%

### ПІДГОТОВКА

Калібратор цистатину С Високий є рідким, і готовий до використання.

### ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ КАЛІБРАТОРІВ

Зберігання: При температурі 2 - 8 °C  
Стабільність: До закінчення терміну придатності  
Стабільність після відкриття: 4 тижні при 2 - 8 °C

НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

### ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- Використовуйте цей Калібратор таким же чином, як вказано по відношенню до реагенту і /або приладу, який використовується.
- Дозвольте калібратору досягнути кімнатної температури (22 -28 °C) перед використанням.
- Калібратор не можна залишати протягом тривалого періоду часу (до 6 годин) при кімнатній температурі. Тримайте флакони весь час щільно закритими, щоб уникнути мікробного забруднення. Невикористовувані флакони зберігайте в холодильнику.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Для використання в in vitro діагностиці.
- Кожна окрема донорська одиниця використана для виготовлення білкового калібратора, була протестована на гепатит В поверхневий антиген (HbsAg), вірус анти-гепатит С (анти-HVC) і анти-ВІЛ 1 та ВІЛ- 2 за вимогами FDA. Оскільки тестовий метод не може остаточно гарантувати, що продукти отримані з крові людини не містять вірусу ВІЛ-1/2, гепатиту В і Гепатиту С, цей матеріал та всі зразки пацієнта повинні оброблятися, так, ніби вони здатні передавати інфекційні хвороби.
- Реагенти, які містять азид натрію потрібно обробляти з особливою обережністю: не ковтати, уникати контакту зі шкірою або слизовою! Азид натрію може утворювати вибухонебезпечні азиди при контакті з важкими металами, такими як мідь або свинець.

### ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, дотримуйтеся місцевих законних вимог.

### ДАНИ АНАЛІЗУ, ЩОДО КОНКРЕТНОЇ ПАРТІЇ

ЛОТ: 671031	Термін придатності: 2022-11-30
Параметр	Визначене значення
Цистатин С	10.0 мг/л



### ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ  
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обдъект М55, 2351 Вінер-Нойдорф  
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,  
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,  
e-mail: [office@dialab.at](mailto:office@dialab.at)



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

