

## НАБІР СТАНДАРТІВ КАЛІЮ (2 РІВНІ)

### Potassium Standard Set (2 levels)

Кат. №: **910180**

Дата випуску інструкції: **22-02-2010**  
Версія **01**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

Кат. № **910180**      Склад: **2 x 3 мл**      1 x 3 мл L1      Повний набір  
1 x 3 мл L2

#### СКЛАД

Водний буферний розчин з хімікатами і консервантами рівня реагенту.

#### ПІДГОТОВКА СТАНДАРТУ

Стандарти знаходяться в рідкому стані і готові до використання.  
Акуратно покрити перед кожним використанням.

#### СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ СТАНДАРТУ

Зберігання: При температурі 2-8 °С

Стабільність: До закінчення терміну придатності

**ЗАКРИТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ**

Не застосовувати стандарти при видимому наявному забрудненні в пробірці.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Продукт призначений тільки для використання in-Vitro.
2. Дотримуватись встановленим запобіжним заходам при роботі з лабораторними реагентами.
3. Помилкові результати можуть бути отримані при неналежному зберіганні або недотриманні процедури поводження зі зразком і його тестування.
4. Містить азид натрію, який може реагувати зі свинцем або міддю і формувати вибухонебезпечні речовини. Змити в каналізацію з великою кількістю води при утилізації даного реагенту. Не ковтати! Уникати контакту зі шкірою, очима та слизовими оболонками.

#### ДАНІ АНАЛІЗУ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПАРТІЇ

Партія: <b>LKS101150</b>		Термін придатності: <b>2016/11</b>
Рівень	Партія	Задане значення (ммоль/л)
Рівень 1	LKS101150	2.8
Рівень 2	LKS201150	6.0

**Значення і термін придатності характерні для кожної окремої партії.**



#### ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ  
Виробництво та продаж хіміко-технічної  
продукції та лабораторних приладів в ІЗ  
НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обдъект М55, 2351  
Вінер-Нойдорф  
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,  
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,  
e-mail: [office@dialab.at](mailto:office@dialab.at)



#### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

